


DIY-102

Uputstvo



High Frequency

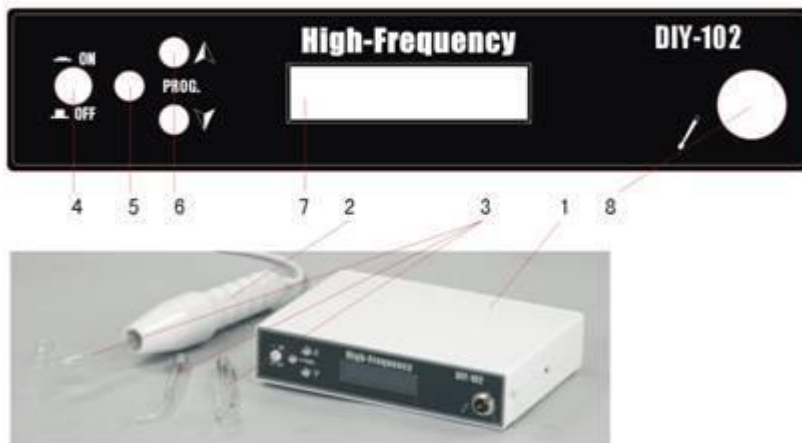

1. DIY aparat sa jednom funkcijom
2. visoko frekvencijska sonda
3. Sterilizirajuća cijev
4. Start-pauza
5. Izbornik
6. Podešavanje izbornika
- Virijeme: 0-60 minuta
Intenzitet: 1-9
7. Zaslou izbornika
8. Izlaz visoke frekvencije

Visoko-frekvencijska terapija

Visoko frekvencijski kozmetički aparat je jako bitan kozmetički aparat. Upotrebom staklene elektrodne cijevi proizvodi se visoko frekvencijska energija koja se aplicira na lice i na taj način postiže tretmanski rezultati.

1. Smiruje živce i ima ljekoviti učinak
2. Produira ozon sterilizatoru i na taj način liječi rane i sužava pore
3. Pospješuje otpornost kože i PH vrijednost te daje potrebnu ravnotežu
4. Ubrzava metabolizam kože i cirkulaciju krvi
5. Ima funkciju za tretiranje bora i djeluje protiv znakova starenja na licu

Način upotrebe

1. Spojite staklenu cijev
2. Odaberite odgovarajuću cijev prema tipu kože koju tretirate
3. Sterilizirajte cijevi
4. Nanesite kremu na površinu koje tretirate
5. Namjestite intenzitet (3-4), testirajte cijev prvo na svojoj ruci prije nego počnete sa tretiranjem klijenta
6. Koristite za probleme očnih kesica
7. Kada ste završili isključite dovod energije, izvucite staklenu cijev i sterilizirajte ju.

Upozorenje

1. Nemojte tretirati jedno mjesto u dužem periodu trajanja
2. nanesite dovoljno kreme na površinu koju tretirate
3. Cijev stavljajte i izvlačite kada isključite dovod energije
4. Izbjegavajte kontakt sa metalima
5. Očistite i sterilizirajte cijevi
6. Nemojte koristiti na oštećenoj ili preosjetljivoj koži
7. Nemojte tretirati trudnice ovim aparatom

Tehnički standardi

Izvor napajanja: ☐ 100-110V ☐ 220-240V

Frekvencija: 50-60HZ

Snaga: 40W

Mjere: 32*21.5*16.5

Lista dijelova

Naziv	Mjera	Količina
Glavno računalo	set	1
Visoko frekvencijska sonda	kom	1
Sterilizirajuća cijev	kom	3
Električni kabel	traka	1
Uputstvo	kom	1