

DIY-110


Uputstvo



Dragi kupci!

Hvala što ste odabrali naš proizvod. Za ispravnu upotrebu i sigurnost, molimo vas da pročitate uputstvo prije nego počnete sa radom. Uputstvo će vam biti jako korisno stoga ga nemojte bacati.

Funkcija sauna deke

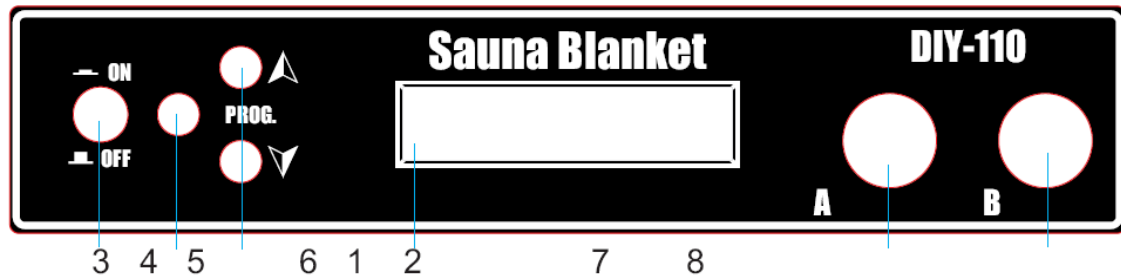

1. Okvir
 2. Sauna deka
 3. Uključiti/Isključiti
 4. Odabir funkcija
- Vrijeme rada 0-60minuta
Temperatura 40-85;
5. Podešavanje izbornika
 6. Zaslona izbornika
 7. Izlaz za infracrveno **A**
 8. Izlaz za infracrveno **B**

Procedura rada

1. Razmotajte deku sa izlazima A i izlazom B koji imaju dvije žice za spajanje.
2. Klijent treba leći u sauna deku.
3. Stisnite ON/OFF kako biste pokrenuli aparat.
4. Namjestite vrijeme u rasponu od 0 do 60 minuta. Kada aparat dođe sa radom na 0 minuta automatski će samostalno prestati sa radom.
5. Namjestite temperaturu u rasponu 40-85°. Kada se aparat zagrije pokazat će stvarnu temperaturu. Kada aparat postigne željenu temperaturu automatski zaustavlja zagrijavanje i održava zadanu temperaturu.

Upozorenje: temperatura prikazana na zaslonu je temperatura grijanja što ne znači da tijelo treba imati istu, s obzirom na navedeno prilikom odabira provjerite sa klijentom kako se osjeća i prema tome prilagođavajte postavke kako biste izbjegli opekotine .

6. Nakon što ste završili sa tretmanom stisnite ON/OFF tipku kako biste zaustavili aparat.
7. Očistite i posušite sauna deku.

Učinak i zabrane

Učinak:

Rastapa masti: infracrvene zrake imaju direktnu akciju na strukturu masti te na taj način tope masti i smanjuju masne stanice.

Uklanjanje masnoća: Infracrvene zrake otpuštaju veliku količinu topline što pospješuje cirkulaciju krvi i limfe te ubrzava metabolizam i biokemijsku reakciju sagorijevanja masti.

Detoksifikacija limfe: Toplina proširuje kapilarne sudove te se na taj način pospješuje cirkulacija krvi, metabolizam i topljenje masnih naslaga. Otopljenje masne naslage ulaze u krv ubrzavaju cirkulaciju limfe i na taj način se tijelo rješava toksina.

Opuštanje mišića: Toplotna energija koju daju infracrvene zrake može smanjiti napetost mišića i opustiti ih.

1. Na tijelo klijenta nanesite kremu ili losion za mršavljenje. Zamotajte klijenta sa zaštitnom folijom i nakon toga upotrebite aparat za tretiranje masnih naslaga.
2. Ukoliko klijent prilikom tretiranja osjeti nelagodu smanjite temperaturu kako biste izbjegli opekotine..

3. Osobe koje imaju ozbiljnih problema sa cirkulacijom ne smiju koristiti tretmane ovim aparatom.
4. Za vrijeme tretmana kozmetičar je dužan da pita klijenta za osjećaj koji ima za vrijeme tretiranja. Ukoliko klijent ima nelagodan osjećaj kozmetičar je dužan smanjiti temperaturu kako bi se izbjegle opekotine.

Zabranjeno

Aparat se ne smije upotrebljavati kod slijedećih osoba:

1. osobe koje su srčani bolesnici
2. osobe sa visokom temperaturom
4. osobe koje imaju problema sa disanjem
5. trudnice
6. osobe sa akutnim infekcijala

Rješenja za jednostavnije kvarove

Pogreška	Rješenje
Uključen aparat nema energije	Provjerite konekciju sa strujom
	Ispitajte da li ima struje ili ne
Nema izlaza infracrvenih zraka	Provjerite da li su dodatci dobro spojeni na aparat
Aparat se pregrijava	Ukoliko se predugo koristi, izgasite i Pustite da se ohladi
	Provjerite da li je aparat pod odgovarajućom voltažom

Tehnički parametri

Voltaža: 110V 220V 230V 240V

Frekvencija: 50Hz 60Hz

Energija: 300W

Pakiranje(cm): 33X22X17

Ukupna težina: 6kg

Lista dijelova

Naziv	Jedinica mjere	Količina	Napomena	
Okvir	Set	1		
Sauna deka	Set	1		
Električni kabel	kom	1		
Uputstvo	kom	1		

Sigurnosne upute

1. Aparat je profesionalni instrument za kozmetičke salone, kako bi se izbjegle bilo kakve neugodnosti samo stručni kozmetičari mogu upravljati ovim aparatom.
2. Nemojte samostalno rastavljati aparat ili upravljati aparatom na bilo koji drugi način koji nije naznačen u ovom uputstvu. Sve popravke na aparatu treba vršiti kvalificirani mehaničar.
3. Nemojte postavljati aparat ukoliko su vam ruke mokre niti postavljati aparat u blizini vode ili bilo koje druge tekućine. Nemojte prosipati/špricati tekućinu po aparatu.
4. Molimo vas da izvučete električni kabel iz utičnice ukoliko se desi nešto od navedenog.

Također obratite se stručnom servisu:

- A. Oprema je došla u dodir sa tekućinom
- B. Oprema ima neugodan miris, proizvodi dim ili jaku buku
- C. Ukoliko je kabel slomljen
- D. Ukoliko oprema padne i razbije se

5. Nemojte stavljati ništa preko električnog kabla, postavite aparat na mjesto gdje se nitko neće spotaketi na kabel.
6. Kada završite sa radom izvucite kabel iz utikača zbog vaše sigurnosti.
7. nemojte stavljati ništa u otvore aparata ukoliko se nešto zavuče i ne možete dohvatiti pozovite stručnog mehaničara koji će riješiti nastali problem, u suprotnom biste se mogli dovesti u opasnost od električnog šoka.
- 8 . Molimo vas da ne stavljate aparat na bilo što što ne može čvrsto stajati.
9. Nemojte naizmjenično paliti i gasiti aparat jer biste mogli smanjiti rok trajanja aparata.
10. Aparat mora raditi prema specifikacijama navedenim na naljepnici u suprotnom neće raditi kako treba ili čak može pregoriti.
11. Kompanija zadržava pravo izmjene uputstva.

Pažnja:

Ukoliko je električni kabel oštećen mora se zamjeniti od strane proizvođača, prodajnog zastupnika ili neke druge kvalificirane osobe kako bi se izbjegle moguće štete. Ovaj aparat ne smiju koristiti osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim psihičkim ili fizičkim sposobnostima ili osobe koje nemaju dovoljno iskustva ili znanja ili ako u blizini nema stručnih osoba koje će vršiti nadzor za vrijeme upotrebe. Djeca trebaju biti pod nadzorom u blizini ovog aparata.