

Princip rada i efekti

Princip mikroelektriciteta

Kada mikroelektricitet prolazi kroz tijelo može stvoriti magnetno polje. Kada elektromagnetni valovi prolaze kroz grudi stvara se osjećaj peckanja zbog toga što magnetni valovi prodiru u unutrašnjost grudi i potiču aktiviranje uspavanih dijelova tkiva, poboljšavaju limfnu cirkulaciju i obnavljaju masnoće u grudima te ih na taj način čine da izgledaju veće.

Princip ritmičkog usisavanja

1. Pomoću bioničke tehnologije dovodi se estrogen u grudi i čini ih područjem u koje se akumulira masnoća i na taj način se grudi povećavaju.
2. Jaki pokreti vježbaju mišiće i potiču izlučavanje estrogena te na taj način grudi dobivaju prirodan izgled.
3. Usisavanje također vježba muskulaturu i opušteno grudi čini čvrstim.
4. Slična funkcija postiže se i kroz regulaciju limfne cirkulacije što dovodi do eliminiranja oticanja i smanjuje se rizici od bolesti dojke.

Princip vibracije

Vibracije mikrovalova omogućavaju kontinuirano aktiviranje područja oko mliječnih žlijezda te na taj način opušteno grudi čine zategnutijim.

Efekti

Masažna vibracija: ubrzava krvnu i limfnu cirkulaciju, vježba i opušta mišiće.


Foton: čini kožu nježnom i glatkom.

Njega grudi: povećava grudi, oblikuje grudi i bradavice, vraća elastičnost grudima.


Njega lica: neguje kožu, smanjuje podočnjake, uklanja mitesere.

Ostalo: oslobađanje od toksina, mršavljenje, jačanje i zatezanje kože, abdomena i slično.


Kontrolna ploča

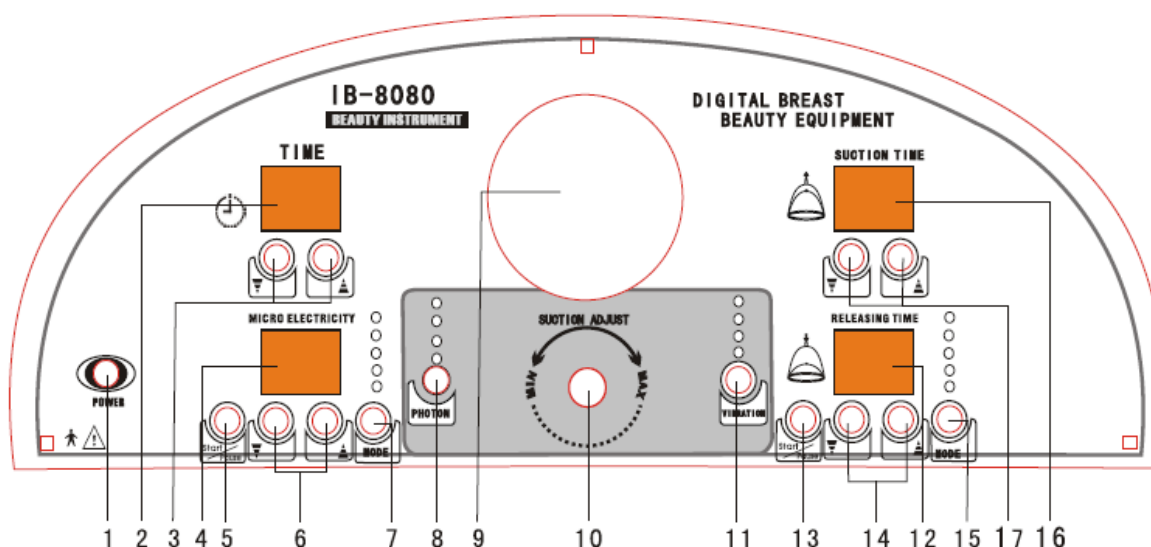


1. Napajanje
2. Prikaz vremena
3. Podešavanje vremena
4. Prikaz razine mikroelektriciteta
5. Start/pauza mikroelektriciteta
6. Podešavanje razine mikroelektriciteta (1-9, slabije do jače)
7. Mod mikroelektriciteta

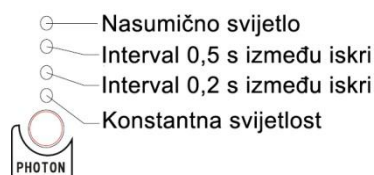


8. Foton mod

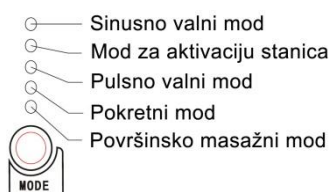

9. Prikaz usisavanja
10. Podešavanje usisavanja (Upaliti aparat; izabrati kontinuirani mod usisavanja, spojiti nastavak na aparat, blokirati ga prstom i regulirati željeni intenzitet)
11. Vibriranje mod

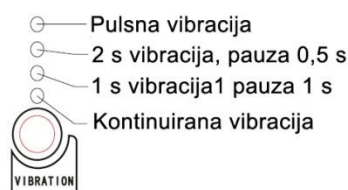

- 12. Prikaz vremena izvođenja
- 13. Start/pauza
- 14. Podešavanje vremena izvođenja
- 15. Izbor moda usisavanja

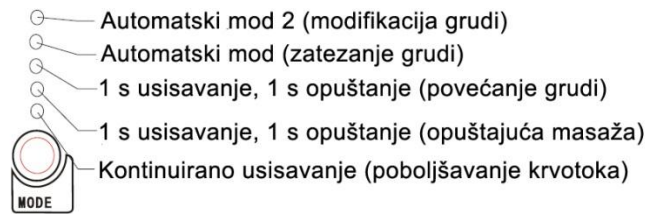

- 16. Prikaz vremena usisavanja
- 17. Podešavanje vremena usisavanja

Pribor



Grudne šalice za vibraciju (6 kom.)




Žica za šalice Cijev s jednim priključkom Cijev s dvostrukim priključkom



(Connect to cupping glass or vacuum glass) (Connect to nipple care glass or breast cups)




Cupping glass Nipple care glass Vacuum glass (For suck comedones and face care)

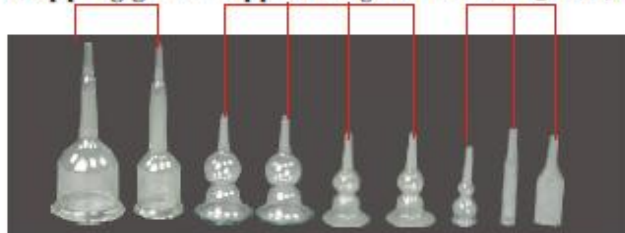

UPUTE ZA SPAJANJE

Dvopriključna cijev se spaja s šalicama za grudi

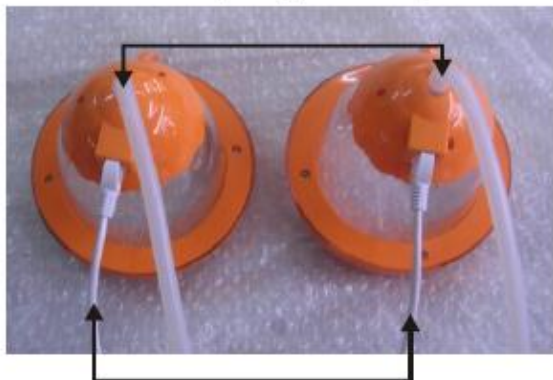

Žica se spaja sa šalicom



A zatim na glavni uređaj

Spajanje dvopriključne cijevi i stakla na bradavice



Double connection pipe Pipe connect to nipple care glass Pipe connect to main frame

Jednopriključna cijev i vakumsko staklo




Single connection pipe Pipe connect to vacuum glass Pipe connect mainframe

Tretman

I. NJEGA GRUDI


Korak 1. Očistiti kožu

Korak 2. Izabrati smjer masaže

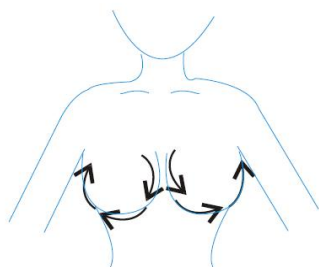


Početak u sredini

Smjer: unutar > dolje > vani > gore > unutar

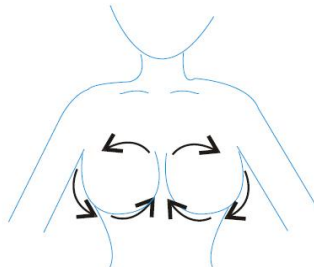

Početak u sredini

Smjer: unutar > gore > vani > dolje > unutar

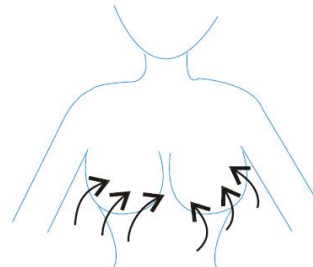

vani > unutar

- dizanje grudi

Korak 3. Rukovanje

Razmazati esencijalno ulje ili kremu za grudi.

Zalijepiti naljepnicu za bradavice.

Naštimiti uređaj.

A. Naštimavanje uređaja za podizanje grudi

- 1.) Izabrati automatski mod 1 (kontrolna ploča - broj 15)
- 2.) Odabrati sinusno-valni mod (kontrolna ploča - broj 7)
- 3.) Odabrati učestalu vibraciju (KP - broj 11)
- 4.) Odabrati slučajno svijetlo (KP - broj 8)
- 5.) Odabrati intenzitet usisavanja - 20

B. Naštímanje uređaja za povećanje grudi

1. Odabrati usisavanje 3 s, otpuštanje 1 s (KP – broj 15)
2. Odabrati mod za aktivaciju stanica (KP – broj 7)
3. Odabrati kontinuiranu vibraciju (KP – broj 11)
4. Odabrati konstantnu svijetlost (KP – broj 8)



C. Naštímanje uređaja za modificiranje grudi

1. Odabrati automatski mod 2 (KP – broj 15)
2. Odabrati pokretni mod (KP – broj 7)
3. Odabrati interval iskri od 0,2 s (KP – broj 8)
4. Odabrati vibracija 2 s, pauza 0,5 s (KP – broj 11)
5. Intenzitet usisavanja – 10

D. Naštímanje uređaja za masažu grudi

1. Odabrati usisavanje 1 s, otpuštanje 1 s (KP – broj 15)
2. Vibracija 1 s, stop 1 s (KP – broj 11)
3. Intenzitet usisavanja – 10

Vrijeme tretmana treba biti oko 15 minuta. Intenzitet usisavanja postupno pojačavati tako da klijent može osjetiti odgovarajuću intenzitet.

E. Naštímanje uređaja za njegu bradavica


1. Odabrati da nema svijetla
2. Usisavanje 2 s, otpuštanje 2 s [KP – 16 i 17(usisavanje) i 12 i 14 (otpuštanje)]
3. Vrijeme tretmana 2 minute
4. Intenzitet usisavanja – 10
5. Nakon tretmana očistiti dijelove tijela
6. Isključiti uređaj, očistiti i sterilizirati pribor



Napomena: Postavke naveden gore u tekstu su samo referentna vrijednost, stvarne postavke mogu biti drugačije ovisno o specifičnoj upotrebi.

II. NJEGA LICA

Vakumsko staklo

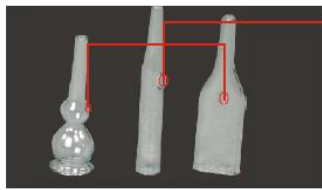

Otvori za regulaciju usisavanja

Procedura

1. Vakum

- 1) Spojiti steriliziranu staklenu šalicu na cijev
- 2) Pokrenuti uređaj i probati intenzitet usisavanja na poledini ruke
- 3) Postoje 3 vrste vakuma: diskontinuirani, kontinuirani i jaki vakum. Kada se tretman koristi na masnoj koži potrebno je koristiti jači vakum. Isto tako, kada se tretman koristi na osjetljivoj koži treba koristiti slabiji vakum.
 - a) Diskontinuirani vakum – tijekom rukovanja srednji prst treba pokrivati i otkrivati mali otvor na šalici u ritmičkim intervalima. Vakum ne treba biti prejak. Ovaj tretman je namijenjen tanjoj i osjetljivijoj koži.
 - b) Kontinuirani vakum – srednji prst prekriva otvor izvjesno vrijeme te se zatim pušta. Potreban je jači vakum i tretman je namijenjen tvrđoj, grubljoj i masnijoj koži.
 - c) Jaki vakum - prst prekriva otvor i ne pušta se. Šalica se stavlja na kožu, usisava i otpušta u intervalima. Intenzitet usisavanja je jak. Tretman je namijenjen masnoj koži.


2. Limfna cirkulacija

Korak 1. Čelo - od sredine prema stranama, od gore prema dolje.



Step 1

Korak 2. Temple - od kose prema dnu uha.

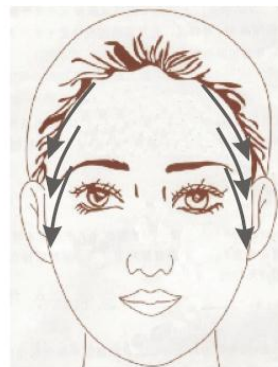


Step 2

Korak 3. Obraz - od nosa prema dnu uha.



Step 3

Korak 4. Usna - od usne do dna uha.

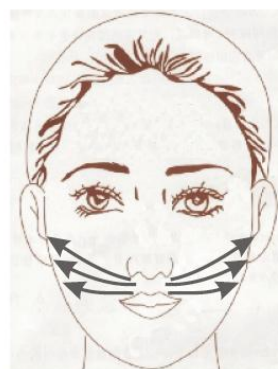

Step 4

Korak 5. Brada - od sredine brade do dna uha.




Step 5

Napomena: intenzitet usisavanja kod ovih tretmana treba biti slab.

III. NJEGA TIJELA

Kontinuirano usisavanje može se koristiti za poboljšavanje protoka krvi u pojedinim područjima.

- 1) Stakla za poboljšavanje dotoka krvi
- 2) Odabrati kontinuirano usisavanje (KP – broj 15)
- 3) Naštimiti vrijeme na 30 minuta (broj 2)
- 4) Intenzitet usisavanja – 20
- 5) Limfna cirkulacija na leđima
 - A) Nanijeti esencijalno ulje na tijelo
 - B) Pritisnuti tipku Start za pokretanje uređaja
 - C) Koristiti pokrete sa slike

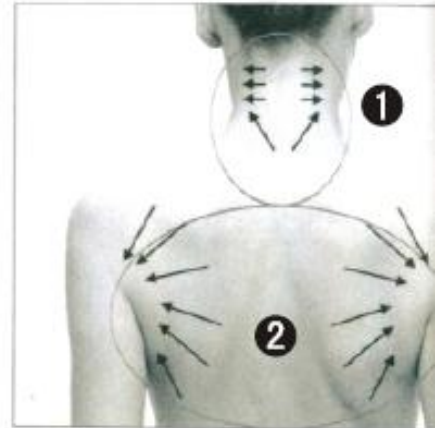

Mogući problemi

Problem	Moguće rješenje
Uređaj je uključen ali ne reagira	Provjeriti napajanje
Nema izlazne reakcije	Provjeriti cijev
Tijekom rada uređaj se pregrijava	Treba napraviti pauzu ukoliko uređaj predugo radi ili provjerit da li je napajanje ispravno
Nema znakova života	Provjeriti da nije osigurač pregorio i zamijeniti ga ako je potrebno.

Tehničke karakteristike

Electricity voltage:AC110V☐ 220V☐ 230V☐ 240V☐

Working frequency:50HZ☐ 60HZ☐

Power:68W

Packing size:55×40×38CM(Table style:IB-8080)

Gross weight:6.7 KG(Tabel style:IB-8080)

Packing size:103×55×46CM(With stand:IB-8080A)

Gross weight:25KG(With stand:IB-8080A)

Sadržaj pakiranja

Name	Unit	Qty	Remark	
Mainframe	set	1		
1# vibration breast cup	Pc	2		
2#vibration breast cup	Pc	2		
3#vibration breast cup	Pc	2		
Breast cup wire	Pc	2		
Double connection pipe	Pc	1		
Single connection pipe	Pc	1		
Cupping glass	Pc	2	Big one and small one	
Small nipple care glass	Pc	2		
Middle nipple care glass	Pc	2		
Gourd shape vacuum glass	Pc	1		
Flat shape vacuum glass	Pc	1		
Round shape vacuum glass	Pc	1		
Airproof loop	Pc	2		
Power wire	Pc	1		
Fuse	Pc	2		
Filter	Pc	1		
Instruction book	Pc	1		

Mjere opreza

- 1.) *Uređaj smiju koristiti samo profesionalne osobe.*
- 2.) *Uređaj smiju rastavljati samo ovlaštene osobe.*
- 3.) *Ne koristiti uređaj mokrim rukama i nedozvoliti proljevanje tekućine po njemu.*
- 4.) *Isključiti uređaj u slučaju proljevanja tekućine po njemu, čudnog mirisa, oštećenog kabela ili nekog drugog oštećenja.*
- 5.) *Isključiti uređaj iz napajanje nakon završetka.*
- 6.) *Ne stavljati nikakve predmete u otvore na uređaju. Ukoliko neki predmet upadne, isključiti uređaj i pozvati ovlašteno osoblje.*
- 7.) *Ne stavljajte uređaj na nestabilna mjesta, ako padne može se oštetiti.*
- 8.) *Kako biste produžili životni vijek uređaja, interval između kontinuiranog rada, gašenja i ponovnog paljenja treba biti preko jedne minute.*
- 9.) *Napon u koji se uključuje uređaj mora biti po definiranim standardima inače se uređaj može oštetiti.*
- 10) *Kompanija ima pravo izmjeniti ili dopuniti ove upute.*