

Aparat za mikrodermoabraziju

Uputstvo



Dragi kupci!

Hvala što ste odabrali naš proizvod. Za ispravnu upotrebu i sigurnost, molimo vas da pročitate uputstvo prije nego počnete sa radom. Uputstvo će vam biti jako korisno stoga ga nemojte bacati.

Način rada

Aparat za mikrodermoabraziju brusi (skida) gornji dio kože uz pomoć inertnih kristala. Vrlo sigurnim, sterilnim, bezbolnim i stupnjevitim postupkom skida mrtve stanice kože i zateže. Za razliku od tradicionalne mikrodermoabrazije, Dijamantni vrh ne koristi slobodne kristale ili abrazive koji mogu prouzrokovati iritaciju i negativnu reakciju kože. Ovaj aparat ima inovativni pristup i nudi antialergijski tretman upotrebom dijamantnih kristala koji uz kontroliranu eksfolijaciju kože inertnim kristalima korigiraju se sve abnormalne pojave na koži. Nakon samo jednog tretmana osjetit ćete da je vaša koža znatno mekša, ravnija i čišća. Kada redovno koristi ovaj sistem, djeluje odlično na sve tipove kože i može se koristiti na licu, vratu, dekolteu ili za cijelo tijelo za dobivanje mladalačkog izgleda. Rezultati će biti odmah vidljivi.

Procedure i napomene

Procedure

1. Naparavanje kako bi se omekšao tvrdi sloj kože
2. Napravite tretman mikrodermoabrazije
3. Očistite kožu gelom za umivanje
4. Nanesite masku za izbjeljivanje i vlaženje lica
5. Nanesite bazu
6. Raspršite ovlaživač
7. Nanesite kremu za sunčanje


Napomene za upotrebu dodatnih proizvoda

1. Svrha aparata je da poboljša izgled kože s obzirom na to dodatni proizvodi koji se koriste za vrijeme tretmana moraju biti sigurni i djelotvorni sa efektom obnove kože.
2. Zabranjena je upotreba proizvoda koji iritiraju kožu poput alkohola i kiselina.
3. Neophodna je upotreba proizvoda koji daju vlažnost koži i koji ne štete koži
4. Potrebno je koristiti kremu za sunčanje kako bi se zaštitila koža.
5. Možete koristiti proizvode koji imaju mirise ali moraju biti čisti, osvježavajući i sa efektom smirivanja kože.

Tabui:

1. Ovo je profesionalni aparat stoga ga mogu koristiti samo kvalificirani kozmetičari.
2. Osobe koje imaju kožne bolesti ne smiju koristiti tretmane ovim aparatom.
3. Ovim aparatom se ne smije tretirati koža koja ima rane.
4. Osobe koje imaju probleme sa venama ne smiju koristiti tretmane ovim aparatom.

Upravljačka ploča i dodatci

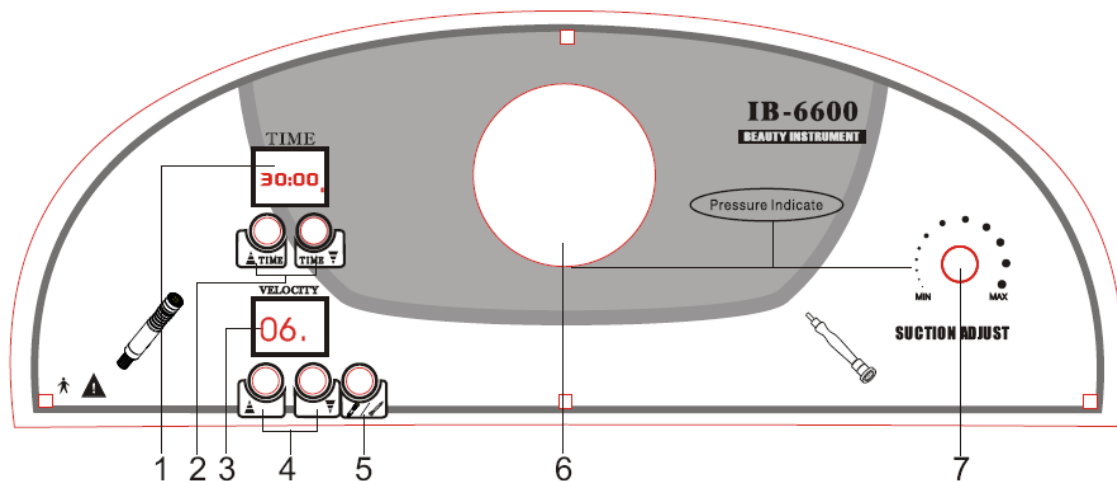


1. Zaslon vremena
2. Podešavanje vremena
3. Zaslon frekvencije
4. Podešavanje frekvencije
5. Odabir funkcije (Obična mikrodermoabrazija, mikrodermoabrazija okretajima)
6. Mjerenje usisavanja
7. Podešavanje usisavanja


Slika: Dodatci za mikrodermoabraziju



Postavljanje dodataka

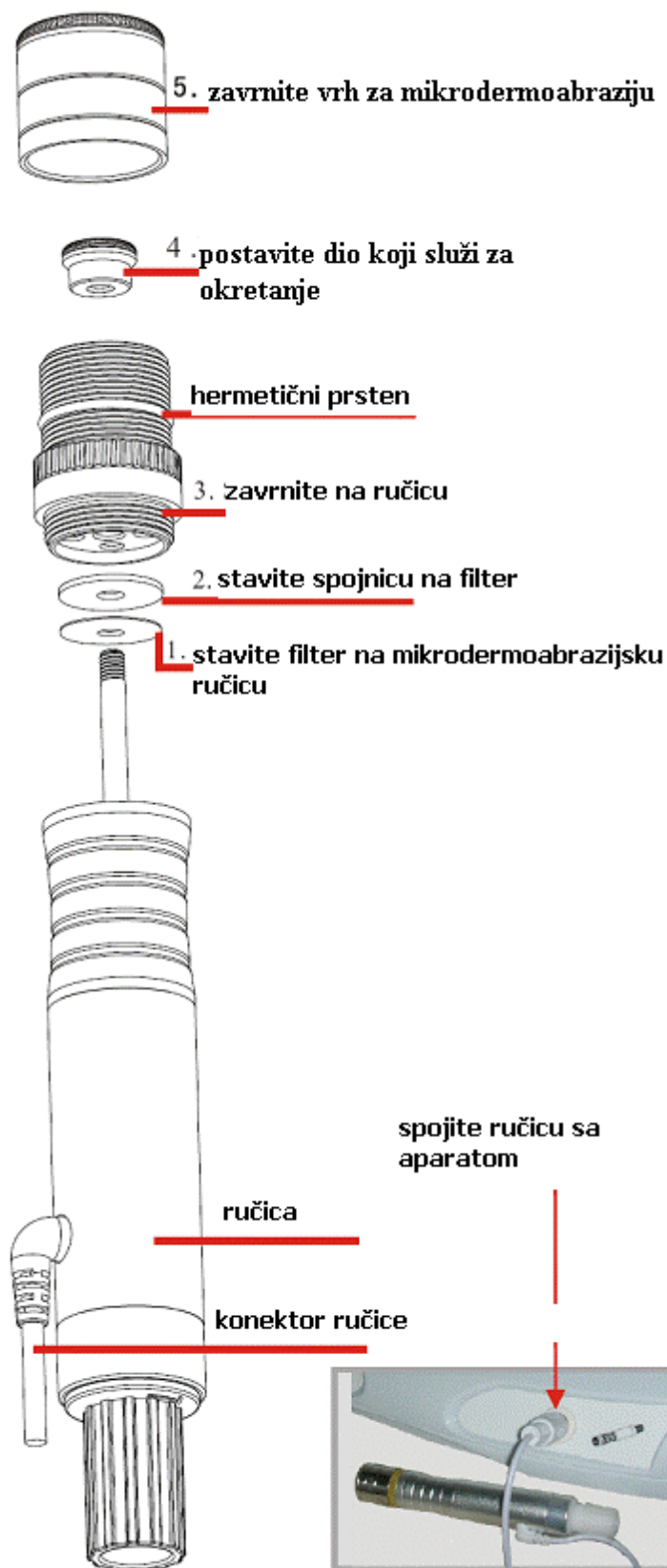

spojite cijev sa ručicom

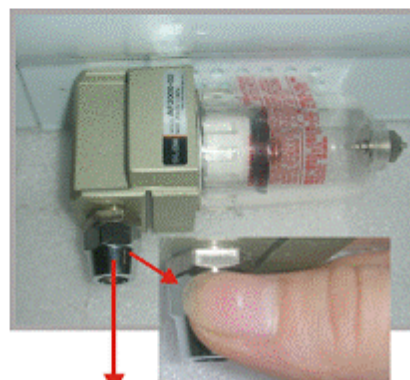

odvrtite vijak



provucite cijev kroz vijak




umetnite cijev u ulaz



zavrните vijak

Ručica za mikrodermoabraziju

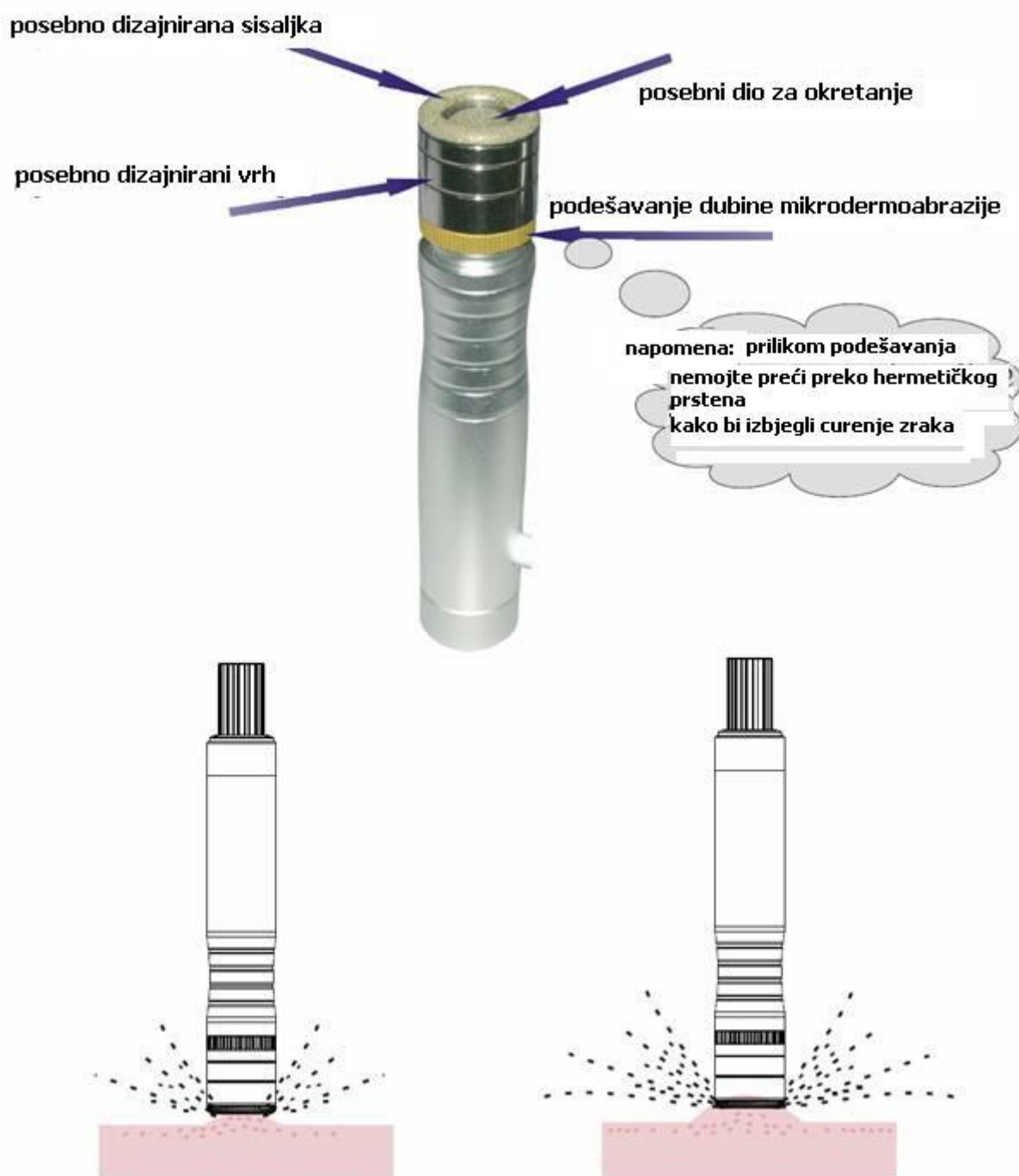

Apliciranjem različitih intenziteta usisavanja i brzine okretanja možete izvesti savršenu mikrodermoabraziju bilo kojeg dijela kože.

Prednosti ručice za mikrodermoabraziju

1. Fleksibilna je da se prilagodi bilo kojem aparatu za mikrodermoabraziju neovisno o brendu aparata. Jednostavna je za postavljanje i upotrebu.
2. Ima različite dijamantne nastavke sa preciznim kristalima koji se koriste za različite dijelove tijela, čak i za dio oko očiju. Možete podešavati nastavke, brzinu usisavanja i okretanja kako biste imali kontrolu mikrodermoabrazije s obzirom na dio kože koju tretirate.



Za mikrodermoabraziju cijelog tijela. (možete koristiti cijeli set nastavaka za mikrodermoabraziju)



Za dio kože oko očiju koristite ovaj nastavak, posebno za tretiranje bora, mitesera i bijelih točkica.



(dozvoljena je upotreba samo ovog nastavka)



Za ožiljke, bore, oštećenu kožu (možete koristiti cijeli set za

mikrodermoabraziju)



3. **Postojanost:** Dijamantna površina omogućuje jako dug vijek trajanja

4. **Sigurnost:** Ukoliko eliminiramo aluminijsku prašinu sa kože, ne postoji nikakva opasnost pri upotrebi. Kozmetičar i pacijent ne moraju udisati aluminijsku prašinu te soba za tretiranje pacijenata mora biti čista. Ovaj tretman je idealan s obzirom da ne postoje nikakve smetnje da se nakon tretmana obavljaju svakodnevne obveze.

5. Rezultat nakon tretmana:

Kada se skinu mrtve stanice kože, koža ostaje čista i ravna te se time povećava i dejstvo proizvoda za njegu kože.

6. Aparat se koristi za tretiranje:

1. Akni
2. Pigmentacije
3. Ožiljaka
4. Strija

Način upotrebe

Primjenom različitog intenziteta usisavanja i okretanja možete napraviti savršenu mikrodermoabraziju bilo kojeg dijela kože.

Koraci:

Korak 1: Uključite aparat u struju i stisnite prekidač

Korak 2: Spojite dodatke za mikrodermoabraziju

Korak 3: Namjestite vrijeme na 15 minuta (osvrnite se na upravljačku ploču No.2)

Korak 4: podesite odgovarajući intenzitet usisavanja. (osvrnite se na upravljačku ploču No.7)

Napomena: ukoliko je koža tanja podesite blaže usisavanje kao npr. za tretiranje područja oko očiju i stopala.

Korak 5: Namjestite odgovarajuću frekvenciju kao npr. nivo 6 Adjust a proper velocity, such. (osvrnite se na upravljačku ploču No.3 4 5)


Napomena: Tanja koža manja frekvencija kao što je područje oko očiju i stopala.

Korak 6: Stisnite tipku 5 kako biste odabrali funkciju (osvrnite se na upravljačku ploču No.5), Obična mikrodermoabrazija se primjenjuje na tankoj koži, mikrodermoabrazija okretajima se koristi za grubu kožu.


Korak 7 : Prije nego napravite tretman prvo napravite test na svojoj ruci kako biste izbjegli prejak usisavanje ili ozljeđivanje kože.

Korak 8: Primjenom različitog intenziteta usisavanja i okretanja možete napraviti savršenu mikrodermoabraziju bilo kojeg dijela kože.


Korak 9: Nakon što ste završili tretman očistite nastavke za mikrodermoabraziju vodom i sa četkom, nakon toga stavite u 75% alkoholnu otopinu na 15 minuta. Nakon što ste odradili sve navedeno, posušite nastavke i spremite u sterilizatorsku kutiju.

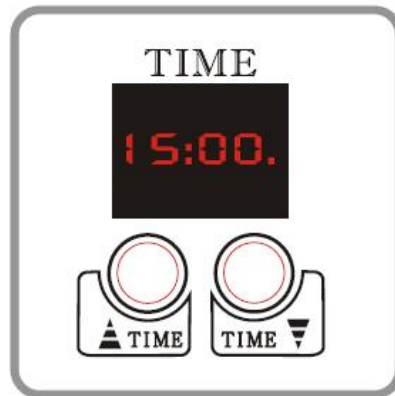

Step 3

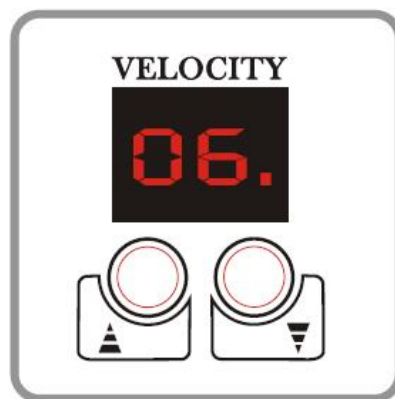

Step 5

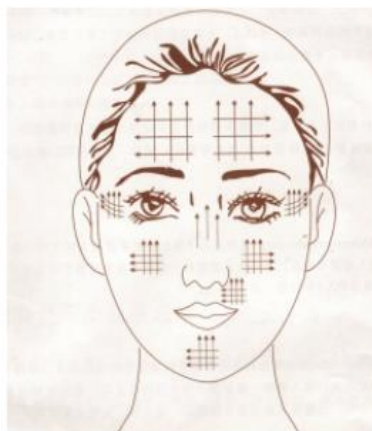

Step 8

Rješenja za jednostavne kvarove

Kvar	Rješenje
Uključili ste aparat ali nema reakcije	provjerite da li ste dobro uključili kabel
	pogledajte da li ste pritisnuli prekidač
Slabo usisavanje	provjerite da li je cijev dobro spojena
	provjerite da li je mrežica filtera začepljena ukoliko jeste, zamjenite je
	provjerite da li je cijev slomljena
Aparat se pregrijava za vrijeme rada	vjerojatno ga predugo koristite, izgasite aparat i pustite ga da se prirodno ohladi
	provjerite da li je struja kako treba, pozovite stručnog električara
Nema dovoda energije	provjerite osigurač, ukoliko je slomljen zamjenite ga

Lista dijelova

Naziv	Mjera	Količ.	Napomena	
Glavno računalo	set	1		
Dijamantni dodatci za mikrodermoabraziju	set	1		
Cijev	kom	1	dužina: 200cm	
Umetak za filter	kom	10		
Filter	kom	10		
Brtva	kom	2	14X2	
Osigurač	kom	2		
Električni kabel	traka	1		
Uputstvo	kom	1		

Savjet

Za vrijeme tretmana nemojte držati ručicu na jednom dijelu kože duže od 15 sekundi kako biste izbjegli ozljede kože.

Pažnja!

A. Ukoliko za vrijeme tretmana osjetite da usisavanje nije dovoljno jako, zamijenite umetak u filteru. Količinu umetka za filter birate prema tipu kože koju tretirate. Nakon što ste napravili tretman mikrodermoabrazije možete klijentu pokazati rezultat. Postoje različiti tipovi nastavaka za mikrodermoabraziju, prvo koristite veliki nastavak pa mali kako biste ispolirali kožu.

Tehnički parametri

Izvor napajanja: AC 110V 220V 230V 240V
Frekvencija: 50Hz 60Hz
Energija: 70 W
Veličina pakiranja (kutija): 54x 40x 23CM
Težina 6.5KG