

PIB-8003

Aparat na bazi infracrvenih zraka-deka za
uklanjanje masnih naslaga

Uputstvo



Dragi kupci,

Hvala Vam što ste odabrali naš proizvod

Kako biste ispravno i adekvatno koristili ovaj aparat, molimo Vas da pročitate uputstvo!

Sačuvajte uputstvo kao pomoć pri vašem radu.

Sadržaj

Način rada i efektivnost

Upravljačka ploča i dodatci

Način rada i upozorenje

Savjeti i zabrane

Tehnički parametri

Lista dijelova

Sigurnost



Način rada i efektivnost

Aparat radi na principu angažiranja infracrvenih zraka. Aparatom se upravlja uz pomoć mikro kompjutera, aparat ima LCD ekran i opciju jednostavnog podešavanja temperature.

Ovisno o stanju tijela i količini masnih naslaga na tijelu, deka za uklanjanje masnih

naslaga se sastoji od tri dijela za podešavanje temperature kako bi se masne naslage potpuno istopile kod svakog pojedinog klijenta.

“ **Topljenje masnih naslaga:** Infracrvene zrake imaju direktan utjecaj na strukturu masti tako da svojim efektom topljenja masnih stanica masne naslage na tijelu se znatno smanjuju.



“ **Eliminiranje masnoća:** Infracrvene zrake otpuštaju veliku količinu topline što pospješuje cirkulaciju krvi i limfe te ubrzava metabolizam i biokemijsku reakciju sagorijevanja masti.

“ **Smanjivanje masnoća:** Infracrvene zrake podižu temperaturu lokalnih tkiva, otvaraju pore za prolazak znoja te se na taj način znatno smanjuje volumen masnih stanica.

“ **Detoksifikacija limfe:** Toplina proširuje kapilarne sudove te se na taj način pospješuje cirkulacija krvi, metabolizam i topljenje masnih naslaga. Otopljenje masne naslage ulaze u krv, ubrzavaju cirkulaciju limfe i na taj način se tijelo rješava toksina.

“ **Opuštanje mišića:** Toplotna energija koju daju infracrvene zrake mogu smanjiti napetost mišića i opustiti ih.

Upravljačka ploča i dodatci

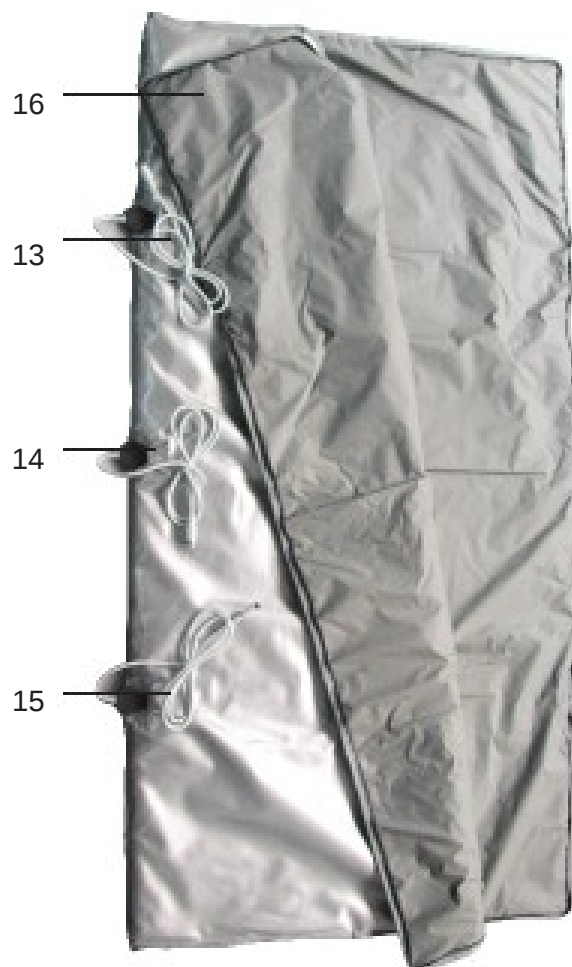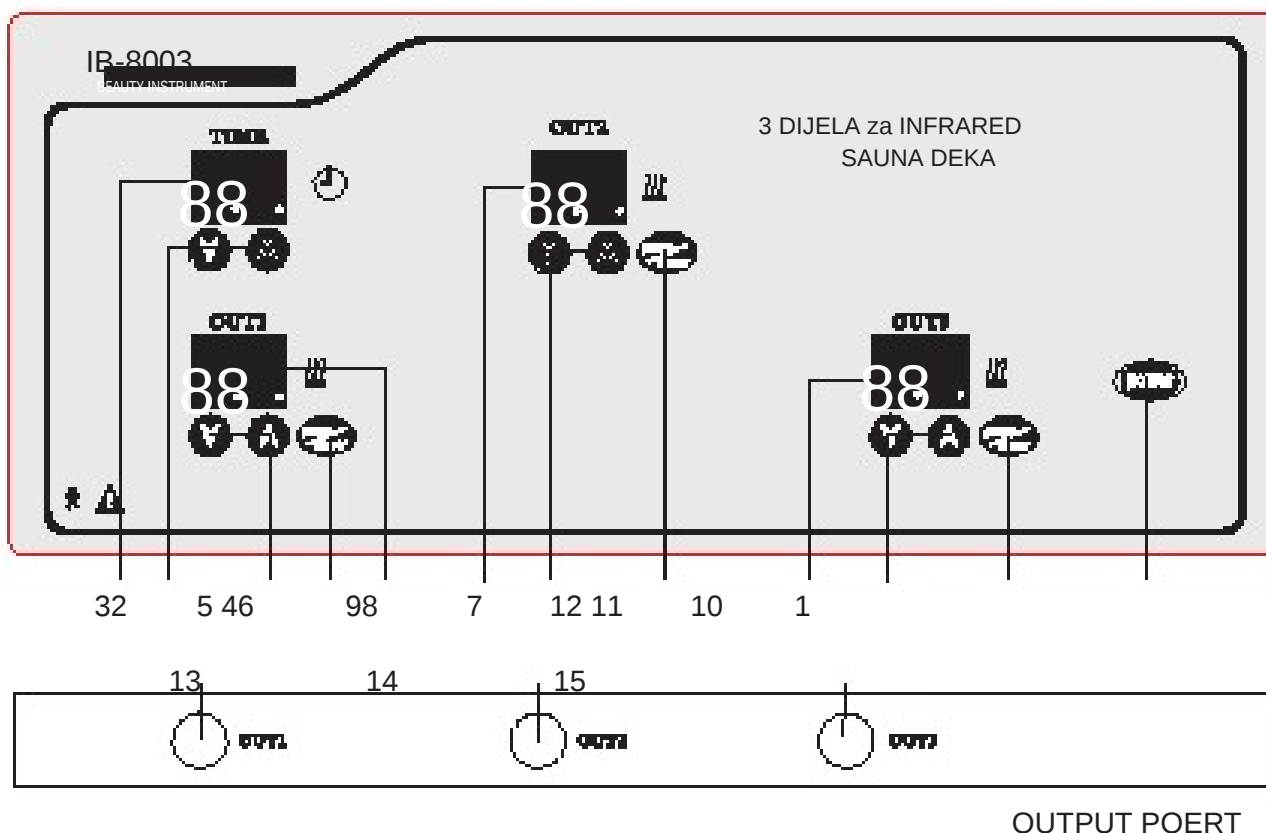

1. Uključivanje aparata
2. Podešavanje vremena (0-60 minuta)
3. Zaslon vremena
3. Izlaz 1 "OUT1"
4. Pauza/uključeno
5. Podešavanje temperature
6. Zaslon temperature
4. Izlaz 2 "OUT2"
7. Pauza/uključeno
8. Podešavanje temperature
9. Zaslon temperature
15. Izlaz 3 "OUT3"
10. Uključeno/pauza
11. Podešavanje temperature
12. Zaslon temperature
16. Deka za topljenje masnih naslaga

Način rada i upozorenje

Korak 1. Raširite deku i spojite je na aparat kao što je prikazano na slici.

Korak 2. Klijent treba leći u deku

Korak 3. Uključite kabel i upalite aparat.

Korak 4. Stisnite "POWER" gumb i ekran će zasvijetliti, zaslon će pokazati unaprijed postavljene parametre, vrijeme je podešeno na 30 minuta, temperatura je 50, aparat je na stanju čekanja.

Korak 5. Vrijeme se može podesiti između 0-60 minuta.

Kada aparat radi, crvena točkica pored broja koji pokazuje minute će svijetliti. Kada vrijeme dođe do 0 minuta aparat će se zaustaviti automatski.

Korak 6. Energija za izlaz 1 OUT1 infracrvenog zračenja,

Postavka temperature je između 40-85.

Kada postavljate vrijeme crvena točkica neće svijetliti, ekran će pokazati temperaturu. Kada se aparat zagrijava crvena točkica će svijetliti, ekran će pokazati stvarnu temperaturu. Kada se dosegne postavljena temperatura ekran će prikazati stvarnu temperaturu.

Kada aparat dosegne zadanu temperaturu crvena točkica će biti svijetla ali neće blinkati što znači da je aparat došao do konstantne temperature i neće se više zagrijavati. Kada ste postigli željenu temperaturu intenzitet možete podešavati prema tipu tretmana koji želite.

Pažnja: Intenzitet temperature se treba podesiti prema osjećaju klijenta

Korak 7. nakon što ste završili sa tretmanom izgasite aparat i izvucite kabel iz utikača.


Korak 8. Očistite i posušite deku




Korak1



Step 3

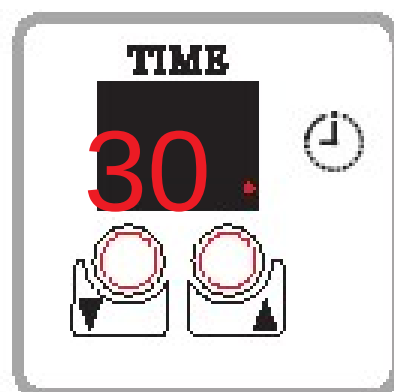

Korak 5

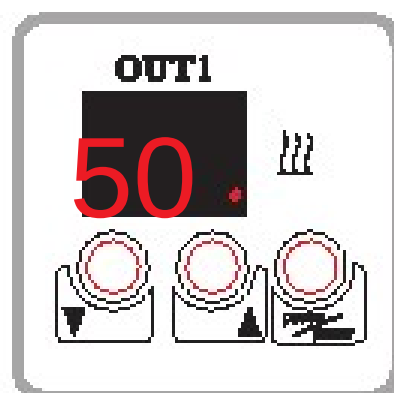

Korak 6

Savjeti i zabrane

Savjeti:

1. Namažite kremu za mršavljenje na tijelo, zamotajte tijelo dekom zatim koristite aparat za tretiranje
2. Ukoliko klijent prilikom tretiranja osjeti nelagodu smanjite temperaturu kako biste izbjegli opekotine.
3. Osobe koje imaju ozbiljnih problema sa cirkulacijom ne smiju koristiti tretmane ovim aparatom.
4. Za vrijeme tretmana kozmetičar je dužan da pita klijenta za osjećaj koji ima za vrijeme tretiranja te ukoliko klijent ima nelagodan osjećaj dužan je smanjiti temperaturu kako bi se izbjegle opekotine.

Zabrane

Tretman ne smiju koristiti slijedeće osobe koje:

- 1) lako prokrvare
- 2) imaju vrućicu
- 3) imaju srčane bolesti
- 4) su u lošem stanju
- 5) imaju bolesti vena
- 6) imaju akutne upale
- 7) su trudne

Tehnički parametri

Voltaža: AC110V	220V	230V	240V
Frekvencija: 50Hz 60Hz			
Energija: 300W			
Pakiranje: 54X31X22 cm		Težina :5.7kg	
Veličina pakiranja(sa stalkom):103x50x41cm		Težina.:22.6kg	
Veličina pakiranja(deka) 91x46x12 cm		Težina.:6.6kg	

Lista dijelova

Naziv	Mjera	Količina	Napomena		
glavni aparat	set	1			
električni kabel	kom	1			
deka		1			
osigurač	kom	2			
uputstvo	kom	1			

Sigurnosne upute

1. Molimo vas da ne rastavljate opremu ili pokušavate neke druge korake koji nisu naznačeni u ovom uputstvu. Sve popravke treba vršiti stručno osoblje.
2. Molimo vas da ne rastavljate ili radite sa aparatom u blizini vode ili dok su vam mokre ruke. Zapamtite da ne smijete sipati tekućinu po aparatu.
3. Molimo vas da izvučete električni kabel iz utičnice ukoliko se desi nešto od navedenog. Također obratite se stručnom servisu:
 - A. Oprema je došla u dodir sa tekućinom
 - B. Oprema ima neugodan miris, proizvodi dim ili jaku buku
 - C. Ukoliko je kabel slomljen
 - D. Ukoliko oprema padne i razbije se
4. Molimo vas da ne stavljate ništa na kabel, postavite aparat na mjesto na kojem nitko neće zapinjati od kabel aparata.
5. Kada završite sa radom izvucite kabel iz utikača zbog vaše sigurnosti.
6. Molimo vas da ne stavljate ništa u utikač aparata kako biste izbjegli požar ili električni šok. Ukoliko nešto uđe u opremu kontaktirajte servis
7. Nemojte podizati aparat sami niti uklanjati nešto iz aparata ukoliko se zaglavilo, u tom slučaju kontaktirajte dobavljača.
8. Molimo vas da ne stavljate aparat na bilo što što ne može čvrsto stajati.
9. Naša firma ima pravo modificirati uputstvo bez predhodnog najavljivanja.