

PB-9105

De-toksin + Infracrveni sliming
sauna aparat

Uputstvo za upotrebu



Ovaj je uređaj pažljivo dizajniran na osnovu istraživanja ljudske bionike, koje kombinira funkcije razbijanja masnoća, otapanja masnoća, limfne drenaže, magnetne terapije za učvršćivanje kože u jednom,

te korištenje visokotehnoloških sredstava za masažu, elektroterapiju i kompresijsku terapiju za postizanje značajnih rezultata.

Mršavljenje

- Infracrvene zrake izravno djeluju na strukturu masnoće, što može dovesti do oslobađanja velike količine toplinske energije, ubrzanja cirkulacije krvi i limfe, poboljšanja metabolizma, ubrzavanja biokemijskih reakcija, trošenja AIP-a, katabolizma masnih stanica, te velikog smanjivanja broja masnih stanica.

- Zračni jastuci se redovito napuhuju i ispuhuju uz stalno mijenjanje zračnog pritiska, što može strljati, rastaviti, te razbiti masne stanice.

Opuštanje i jačanje imuniteta

- Toplinska energija generirana infracrvenim zrakama može smanjiti napetost mišića, te opustiti mišiće.


Pojačavanje djelovanja lijekova

- Stimuliranje apsorpcije lijekova kako bi se pojačao učinak liječenja.

Ostale funkcije

- Poboljšava liječenje, smanjuje upale, smiruje osobu, osigurava miran san.

Kontrolna ploča:

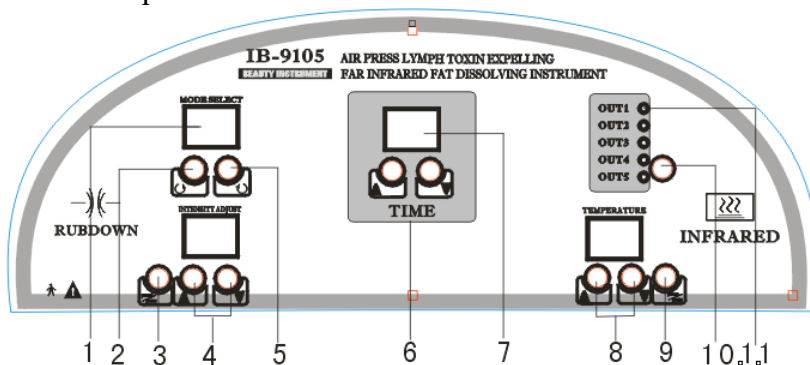

1. Displej zračnog De-toksin aparata
2. Podešavanje De-toksin modusa
3. De-toksin start-pauza
4. Podešavanje željenog pritiska De-toksin
5. De-toksin tajmer
6. Glavni tajmer za podešavanje željenog vremena tretmana
7. Displej glavnog tajmera
8. Podešavanje temperature infracrvenog sliming aparata
9. Infracrvena start-pauza
10. Podešavanje temperature za pojedine dijelove infracrvenog aparata
11. Indukcijsko svjetlo za infracrveni aparat

Uputstvo za upotrebu Infracrvenog sliming aparata

1. Komande za Infracrveni aparat su na desnoj strani.
 2. Sa tipkom (8) izaberite željenu temperature i željeni dio za tretiranje. Kada lampicu izlaza (OUT 1 do 5) uključite tada pritisnite tipku Start. Crvena lampica je uključena (u donjem desnom kutu), potom prilagodite temperature sa tipkom (8). Kada je temperatura zadana u roku, lampica se ugasi za 3 sec, a kada se crvena lampa ugasi to znači da je grijanje započelo i grijati će do zadane temp. te je održavati dok se ne promjeni . Ako se na displeju pokaže oznaka "FO" to znači da dijelovi aparata nisu pravilno spojeni i temperatura se ne može podešavati.
 3. Postupak ponovite za svaki dio koji želite aktivirati tj. tretirati (OUT lampice)
- Ako izaberete više od jedne partije na displeju će biti lampicom obilježene

sve one koje ste odabrali.

4. Lampice će se paliti (podešene) svakih 3 sec.
5. Nakon upotrebe aparata isključite na OF, izvucite kabel iz utičnice i očistite odijelo .

Uputstvo za upotrebu Air De-Toksin aparata

- 1.Uključite aparat u utičnicu
- 2.Izaberite modus željenog izlaza.Modus 1 za noge, 4 načina naduvavanja zraka ; Modu 2 za struk ,2 načina cirkulativnog napuhivanja; Model 3 svi tipovi valovitog napuhivanja istovremeno.
- 3.Prilagodite tajmer koji nudi 6 načina, 10s,15s, 20s, 25s, 30s, 35s.
- 4.Odaberite način izlaza valova: Pritišćući prema dolje možete odabrati 2 izlaza a prem gore 1 izlaz vavlova.
- 5.Prilagodite intenzitet valova na izlazu.

UPOZORENJE:

Pojaseve za sliming održavati čistim sa neagresivnim sredstvom za čišćenje kao i sa antibakterijskim sredstvom (preporuka ASEPSOL EKO Pliva). Ovaj aparat je koristan za održavanje željene figure tijela,uz pomoć sredstava za mršavljenje kao i za masažu tijela.

Pomoć pri kvaru aparata:

Malfunction management:

Ukoliko primijetite nepravilnosti u radu aparata pažljivo pročitajte uputstvo.Ukoliko i nakon eventualno potrebne intervencije i dalje imate problema molimo aparat predajte najbližem ovlaštenom servisu.

Svi kvarovi(osim mehaničkih kvarova) nastali u garantnom roku (ukoliko ste se pridržavali ove upute)biti će uklonjeni na trošak vašeg dobavljača.

Po isteku garantnog roka,za održavanje i eventualne kvarove se obratite vašem dobavljaču.

If exceed guarantee period, you could negotiate with the supplier.

Lista pripadajućeg pribora

Naziv	Jed.mjere	Količina	Zabilješka
Glavno kućište	Set	1	
Napojni kabel	komad	1	
Pojas za ruke	komad	2	
Pojas za stomak	komad	1	
Pojas za noge	komad	2	
Spojke	komad	2	
Uputstvo za upotrebu	komad	1	

Tehnički podatci :

Karakteristike

- Napajanje: 220V/50Hz . 110V/60Hz
- Snaga: 180W
- Vlažnost: 80% without condensation
- Dimenzije: 103cm (L) ×55cm (W) ×46cm (H)
- Težina: 29Kg (Uključujući pribor)