

Upute za upotrebu aparata sa visokom frekvencijom F-806



Instrukcije za upotrebu visoko frekvencijske elektroterapije

Teorija o visoko frekvencijskoj elektroterapiji

Visoko frekvencijski elektroterapijski aparat stvara struju visoke brzine koja može pretvoriti toplinu energije i ubiti bakteriju. Iako su vibracije jake neće uzrokovati stezanje mišića. Pored svega daje psihičku stimulaciju.

Funkcija:

- a. Ubrzava cirkulaciju krvi
- b. Stimulira aktivnost žlijezda
- c. Ubrzava metabolizam
- d. Ubija bakterije
- e. Pomaže koži da izlučuje i apsorbira
- f. Proizvodi toplinu unutar tkiva kože
- g. Pomaže prodiranje kreme duboko u kožu

Upute

Prvo pronađite ispravnu staklenu elektrodnu cijev i umetnite u utor elektroterapeutske ručice, zatim spojite na aparat.

Pozicija staklene elektrodne cijevi:

- a. Elektrodna cijev u obliku gljive---koristi se za veće površine kože: lice, čelo, vrat, itd.
- b. Elektrodna cijev u obliku kutlače---koristi se za srednje velike površine: brada, itd.
- c. Točkasta elektrodna cijev---se koristi za mala područja: nos itd.
- d. Ravna elektrodna cijev---koristi se za indirektni tretman.

Direktna upotreba:

- a. Kozmetičar treba uzeti ručku sa visokom frekvencijom elektroterapijskim polom (pokušajte ne dodirivati staklenu elektrodnu cijev sa rukama ili metalnim predmetima), i okrenite **“H/Energy”** dugme na minimum.
- b. Prvo uključite na **“Hi-Frequency”**, i okrenite **“H/Energy”** dugme na minimum zatim dotaknite dio tijela koji je potrebno tretirati sa staklenom elektrodnom cijevi, lagano podesite **“Hi-Frequency”** dugme u smjeru kazaljke na satu dok ne osjetite blago frekventnu struju. Ako je lice prekriveno sa kremom ili maskom, pomjerite elektrodnu cijev prema klijentovom vratu, lagano pređite bradu, obraze, nos i čelo. Za vrijeme trajanja tretmana lagano podešavajte **“H/Energy”** na odgovarajući intenzitet.
- c. Kožno tkivo će upiti toplinsku energiju, opustit će i smiriti kožu direktnom

upotrebom elektroterapije, a prvobitna svrha je ubijanje bakterija. Koristi se za masnu kožu i kožu koja ima problem sa aknama.

- d. Nakon tretmana, lagano okrenite **“H/Energy”** dugme na minimum, i ugashite **“Hi-Frequency”**, sklonite staklenu elektrodnu cijev sa klijentovog lica.

Indirektna upotreba:

Prvo dajte klijentu da drži elektrodnu cijev, i uključite **“Hi-Frequency”** postupno uključite **“H/Energy”** na željeni intenzitet, zatim će kozmetičar klijentu izmasirati tretirani dio. U cijelom ovom procesu kozmetičar ne dira elektrodu. Kozmetičar mora ugashiti prije nego skine staklenu elektrodnu polu sa klijenta. Indirektna upotreba će pospješiti i opustiti kožu u isto vrijeme.

Upozorenja:

- a. Staklena Elektrodna pola će zabljesnuti kada se nađe razmaku manjem od jednog inča od kože dok se aparat pali, molimo smanjite energiju frekvencije **Hi-Frequency**. Ako klijent još uvijek primijeti bljeskanje može prekriti lice sa malim dijelom suhe tkanine ili pamučnim ručnikom za lice; ne smije biti najlonski ili sintetički.
- b. Za sprječavanje električnog šoka kozmetičar mora odabrati minimalni intenzitet prije dodira s klijentovim licem, i polako povišivati energiju.
- c. Prije otklanjanja električne cijevi sa kože morate okrenuti **“H/energy”** na minimum, zatim isključiti energiju i tek onda skloniti cijev.
- d. Kada puniti ili prazniti staklenu elektrodnu cijev morate okrenuti **“H/Energy”** na minimum i potom ugashiti (power off **“H/Energy”**)
- e. Staklene elektrodne cijevi se moraju očistiti, posušiti i sterilizirati nakon upotrebe.

Oprez!

- a. Klijentima nije dozvoljeno da nose bilo kakav metal na sebi za vrijeme tretmana, ako nose bilo kakav nakit moraju ga skinuti prije nego pristupe tretiranju.
- b. Trudnicama i osobama koje imaju problema sa srcem nije dozvoljeno da koriste frekventnu elektroterapiju
- c. Krema ili maska koja se koristi u frekventnoj elektroterapiji ne smije sadržavati špirit. Ako morate koristiti toaletnu vodicu sa špiritom koristite je nakon tretmana.
- d. Nemojte doticati očne jabučice niti jednom elektrodnom cijevi.
- e. Zabranjeno je dirati metalni dio aparata ili ručku dok je aparat uključen.

