

Upute za upotrebu aparata sa vakuumom i raspršivačem F-807A




Teorija vakuuma i raspršivača

Vakuum-----Koristi male staklene cijevi za izvlačenje mitesera, bubuljica, akni, nečistoća, masnoće itd.

Raspršivač-----Koristi bočicu sa prskalicom kako bi nanijelo kozmetičku vodicu, antipiretik, ili losion s namjerom da umanjiti upale opusti i njeguje kožu.

Upravljačka ploča

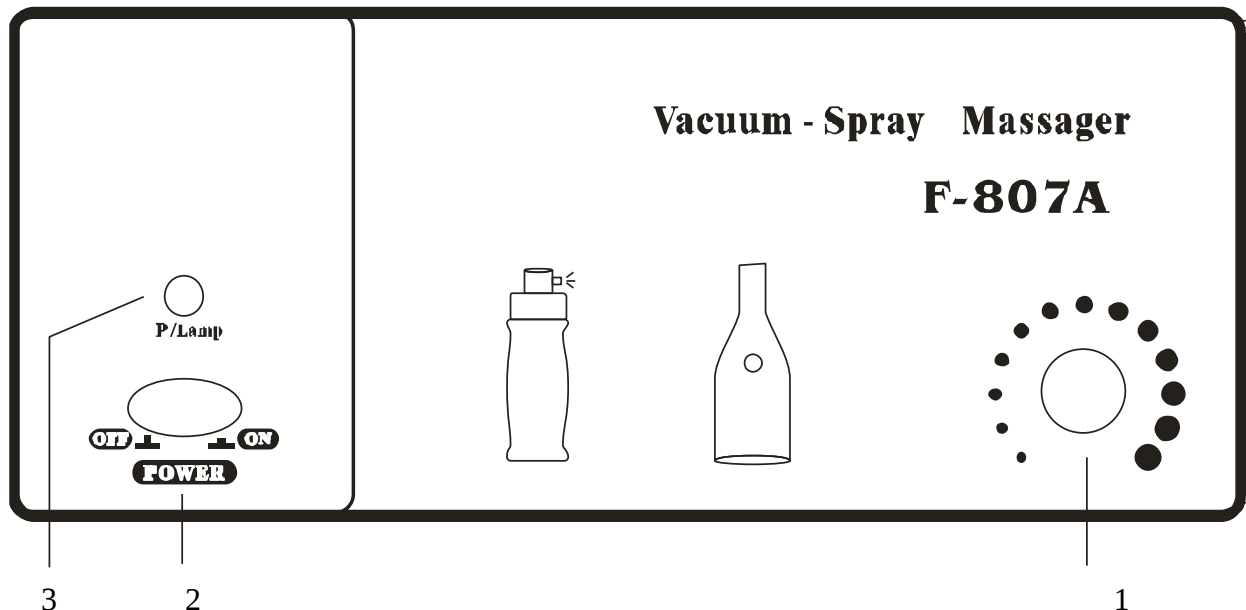

1. Regulator sisaljke
2. Prekidač
3. Statusna lampica dovoda energije

Upute i zahtjevi

1. Uklanjanje mitesera vakuumom: Prvo spojite jednu cijev na odgovarajući ventil za cijev, drugi dio na malu staklenu vakuumsku cijev (potrebne su četiri cijevi za tretiranje mitesera vakuumskim izvlačenjem). Zatim uključite "POWER" i namjestite regulator sisaljke prema potrebi. Preporučuje se da stavite malo apsorbirajućeg pamuka u staklenu vakuumsku cijev kako biste zaustavili nečistoće da prođu u cijev i oštete aparat. Staklena vakuumska cijev ne smije ostati predugo na licu kako ne bi oštetila i opekla lice. Normalno je da na početku odmah nema vakuuma ali naravno ubrzo će doći u pravo stanje.
2. Prskalica: Prvo spojite jedan dio cijevi na odgovarajući ventil bočice a drugi dio na malu raspršivačku bočicu. Nakon toga uključite "POWER". Dvije raspršivačke

bočice koje sadrže različite tekućine će prskati stiskanjem prstom mlaznice koja se nalazi na vrhu bočice, špricajte prema dole počevši od čela, spriječite tekućinu da uđe u nosnice, zamolite klijenta da zatvori usta i oči. Držite adekvatnu razdaljinu od klijentovog lica.

Bilješke

1. Normalno apliciranje ne bi trebalo trajati duže od 5 minuta, u slučajevima kada je aparat previše zagrijan molimo va da ugassite sva dugmadi i ponovno pokrenite za 10 minuta.
2. nakon što ste završili sa apliciranjem, prvo ugassite “POWER”i odvrnite regulator, zatim sve cijevi i dodatnu opremu dezinficirajte.

Upozorenja!

1. Nemojte gurati raspršivač u ventil vakuumske cijevi i pazite da kozmetička vodica ili druga tekućina iz bočice ne ošteti aparat.
2. Nemojte raditi s aparatom preko dozvoljenog vremena jer biste mogli oštetiti aparat.

