

Upute za upotrebu aparata za piling kože F-808



Funkcija:

1. Uz pomoć ultrazvučnih valova, aparat čisti mitesere, prištiće, nečistoće, ostatke kozmetike i masnoću s lica.
2. Uz pomoć pomjeranja galvanskih elektrona, magičan je u otklanjanju bora i crnih fleka s lica.


Dovod energije:

1. Provjerite da li voltaža utičnice i aparata odgovaraju jedna drugoj. Prije uključivanja aparata u budite sigurni da su vam ruke potpuno suhe kako bi ste izbjegli električni šok.

Način upotrebe:


Očistite kižu

1. Stisnite “P2” tipku kako biste počeli sa programom čišćenja.
2. Omotajte narukvicu oko klijentovog ručnog zgloba.
3. Namjestite “ENERGY” na odgovarajuću snagu energije.
4. Nanesite sredstvo za čišćenje jednako na površinu kože.
5. Koristite sondu prema metodama prikazanim na dijagramima A,B,C

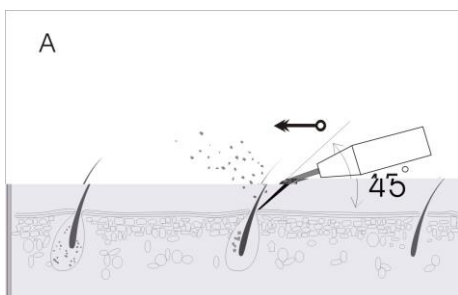


A. Očistite akne bez boli

Super zvučni frekvencijski val raspršuje akne duboko u porama i istiskuje ih van bez ikakvog osjećaja boli i u isto vrijeme čisti kožu.

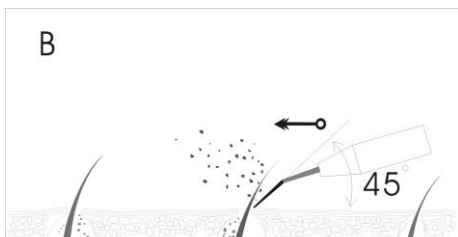

B. Čisti male boginje

Super zvučna frekvencija od 28,000 unosi preparate za uklanjanje boginja u korijen i na taj način ih uklanja i rješava problem kože u veoma kratkom vremenu.

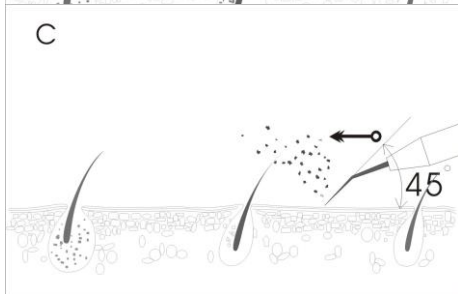


C. Uklanja zanoktice

Sa upotrebom učinkovite vibracije aparat je potpuno siguran za uklanjanje starih zanoktica i mrtve kože.

Regenerira kožu

1. Stisnite “P1”, “P2” tipke za uključivanje programa.
2. Omotajte narukvicu oko klijentovog zgloba ruke.
3. Namjestite “INTENSITY”, i “ENERGY” na odgovarajuću snagu.
4. Namažite početnu tekućinu jednako na dijelove tretirane kože.
5. Koristite s metodom kao što je prikazano dijagramom D i E

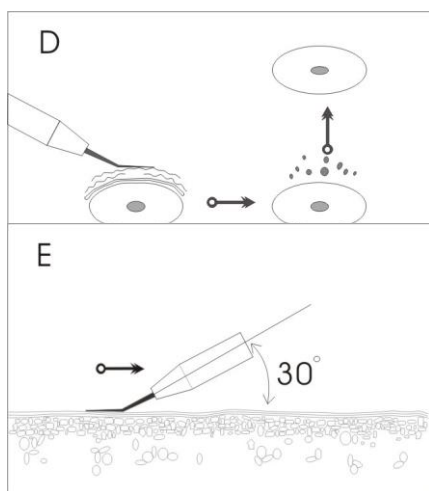

D. Uklanja melanin

Aparat koristi provodnu voltažu kako bi rasprsnuo melanin i izvukao ga van

E. Ravna bore

Super zvučna frekvencija i vibracija aktiviraju kožu što pomaže pri omekšavanju kože i ravnanju bora.

Operacijski proces

A. Čišćenje kože (Mehaničko i kemijsko dejstvo)

1. Stisnite “P2” tipku kako bi ste počeli s programom, vrijeme je namješteno na “15” minuta, stisnite “STATE” tipku kako biste odabrali stanje vala, stisnite “ENERGY” tipku kako biste namjestili odgovarajuću snagu energije.
2. Stisnite “P2”, “P1” tipke i stisnite “LEAD” da biste odabrali “O” za funkciju čišćenja kože za najbolji učinak.

Bilješke:

1. Kada odaberete “P2” program, postavite narukvicu na zglob ruke. Rad će započeti onog trenutka kada narukvica dotakne kožu. Prestat će a radom kada odmaknete sondu od kože i nastaviti sa radom kada je ponovno vratite na kožu.

B. Galvanska funkcija (elektron posebne učestalosti)

1. Funkcija:

- (1) Antibakterijska deodorantna električna provodna sonda unosi posebnu mikro-električnu

struju na vašu kožu i pomlađuje i aktivira kožu.

- (2) Radi na stanicama kože unutar kože i pospješuje aktivnost kože, liječi bore oko očiju, usta, brade i ravna površinu kože.
- (3) Stimulira stanice kože pospješuje obnovu krvi i limfnu cirkulaciju, podiže opušteno dijelove kože i uklanja crne točkice.
- (4) Vraća vlagu, sjaj i elastičnost kože.

Upozorenje:

1. Osobe sa sljedećim oboljenjima ne smiju koristiti tretman:
 - Osobe sa srčanim oboljenjima
 - Osobe sa infekcijskim oboljenjima
 - Osobe koje imaju metal u sebi zbog neke nesreće ili tretmana
 - Osobe sa posebno osjetljivom fizičkom građom
2. Nemojte držati sondu predugo na licu kako biste izbjegli opekotine kože.
3. Ukoliko nema dovoljno tekućine zamijenite je.
4. Ukoliko sonda nije dobro postavljena, izvadite je na pravi način. Nemojte čupati na silu.
5. Ukoliko je žica odspojena iza, izvucite utikač iz utičnice. Nemojte isključivati čupanjem žice.
6. Ukoliko nema oznake vodootpornosti na aparatu, nemojte proljevati vodu po aparatu.
7. Namjestite sondu ispravno kako biste izbjegli oštećenja.
8. Pazite površinu aparata, nemojte naslanjati ništa na aparat.
9. Prije uključivanja aparata u struju provjerite voltažu utičnice i aparata, pobrinite da je voltaža odgovarajuća.
10. Zabranjeno je samostalno otvaranje kućišta. Ukoliko zamijetite nešto neobično obratite se dobavljaču ili sigurnom tehničaru.

Položaj zaslona.

1. treba biti položen na kozmetička kolica.
2. Treba biti postavljen na mjestu gdje postoji utikač za sondu.
3. Nemojte koristiti u vlažnom prostoru poput kupaoalice.
4. Nemojte ga koristiti u prostoru gdje ima plina (2m udaljenost).
5. Žica i aparat trebaju biti udaljeni 1.5m

Rutinsko održavanje

1. Ulje sa sonde treba biti obrisano odmah nakon upotrebe.
2. Nakon upotrebe držite sondu suhom, uvijek stavite u zaštitnu vrećicu.

