

UPUTE

za upotrebu aparata za uljepšavanje i podizanje grudi F822

Uvod

Pune i elastične grudi koje su lijepo oblikovane i uspravno stoje pokazuju ljepotu i simbol su današnje moderne žene. S obzirom na to, povećavanje i oblikovanje grudi su svakodnevne teme žena. Pritisnuti sa današnjim pravilima ljepote kozmetičari su gledali unaprijed i izmislili aparat sa plimnom strujom za mnogo profesionalnije i zdravije oblikovanje grudi. F-822 profesionalni aparat za grudi je proučavan i napravljen za gore navedene svrhe. Usmjereni prema nedostatku aparata ovakve vrste kozmetičari su napravili profesionalan aparat za uljepšavanje grudi.

1.Značajke aparata

- 1.Novi tip pumpice koji dobro prijanja uz tijelo kako bi bio što učinkovitiji u usisavanju i opuštanju.
2. Aparat ima protektor koji gasi aparat onog trenutka kada se pregrije kako bi spriječio štetu.
3. Ukoliko se koristi jače usisavanje osjeća se jaka masaža i ritam.
4. Ima više nivoa ritma. (Od minimalnog of 0.4 sekunde do maksimalnog 7.50 sekunde.)
5. Ima potpuno novi dizajn pritiska za mnogo preciznije tretiranje.
6. Ima posebno oblikovane čašice kako bi mišiće skupio i oblikovao u najbolji oblik.
7. Ima posebno dizajniran metalni konektor kako bi se izbjegla lekaža zraka prilikom pregrijavanja gumenih dijelova za vrijeme rada.

2. Osnove lijepog tijela

Upotrebom tretmana čiste fizioterapije bez otrova, zagađenja ili bilo kakvog štetnog utjecaja na ljudsko tijelo – masaža zrakom uz pomoć regularne ritmičke kondicije, cirkulacijski sistem ljudskog tijela se aktivira tako da lokalni mišići mogu dobiti dovoljno nutrienata i vježbe a krajnji rezultat je ljepote i zdravlja.

1. Osnove povećavanja grudi

Prema fiziološkoj teoriji veličina grudi ovisi o lipocitima koji zauzimaju najveći dio strukture grudi. Kako biste podigli i povećali grudi lipociti se moraju povećati i nateći; Mora doći do apsorpiranja masnih kiselina. Zbog ovog razloga hormon estradiol ima svoj učinak. Estradiol hormon iz drugih dijelova tijela mora biti skupljen u sastav grudi tako da se lipociti mogu aktivirati njegovim djelovanjem.

2.Osnove povećavanja stražnjice

Da li će stražnjica biti ravna ili punašna ovisi o lipocitima i stanicama u stražnjici. Dok veličina stanice ovisi o mogućnosti apsorpiranja masnih kiselina. Kako bi povećali mogućnost stanica da apsorbiraju masnu kiselinu, estradiol hormon koji se luči kod žena za vrijeme menstruacije mora se usisati u stražnjicu putem krvotoka tako da u kombinaciji stanica stražnjice apsorpira masnu kiselinu i povećava volumen cijele stražnjice. F-822 profesionalni kozmetički aparat koji koristi efikasno usisavanje i masažu može aktivirati cirkulaciju krvi masnih stanica i lokalnih mikro-vena. Učinkovitim stiskanjem u mikro-venama estradiol hormon i masne kiseline u krvotoku mogu biti učinkovitije apsorbirane pa će se na taj način lakše proširiti i narasti tako da stražnjica izgleda punije.

U međuvremenu masaža pomaže da se vježbaju mišići tako da stražnjica dobije lijep i oblikovan izgled.

3. Način tretiranja

Prvi korak: Očistite dio koji će te tretirati kremom za tijelo

Drugi korak: Omotajte odgovarajući zavoj na mjesto koje će te tretirati i masirajte 10 minuta.


Treći korak: radite sa aparatom 20-25minuta

Četvrti korak: primijenite relaksirajuću masažu 5-10min


Peti korak: Očistite mjesto koje ste tretirali

Šesti korak: Nanesite losion za tijelo jednako na mjesto koje ste tretirali

4.Uvod u aparat i dodatke

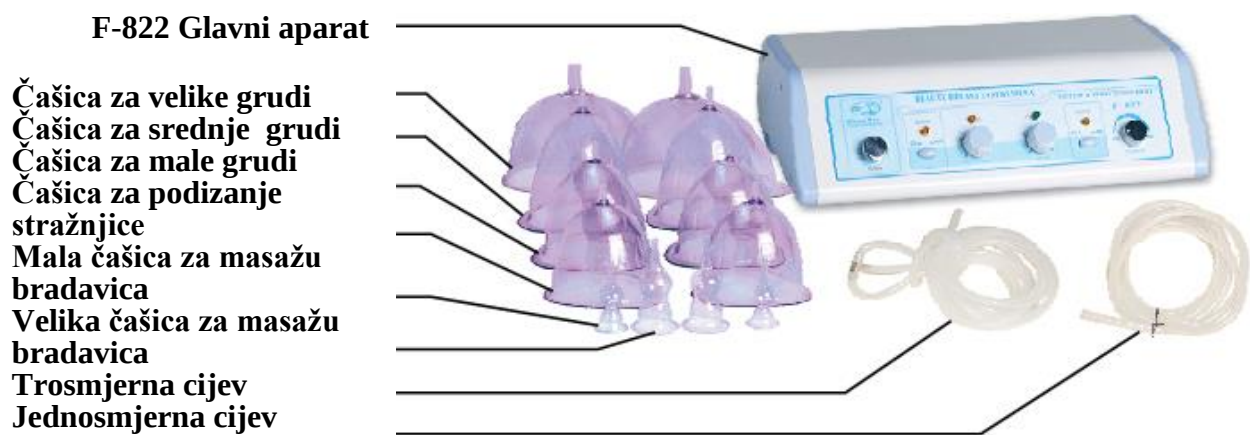

Uvod operativnu ploču

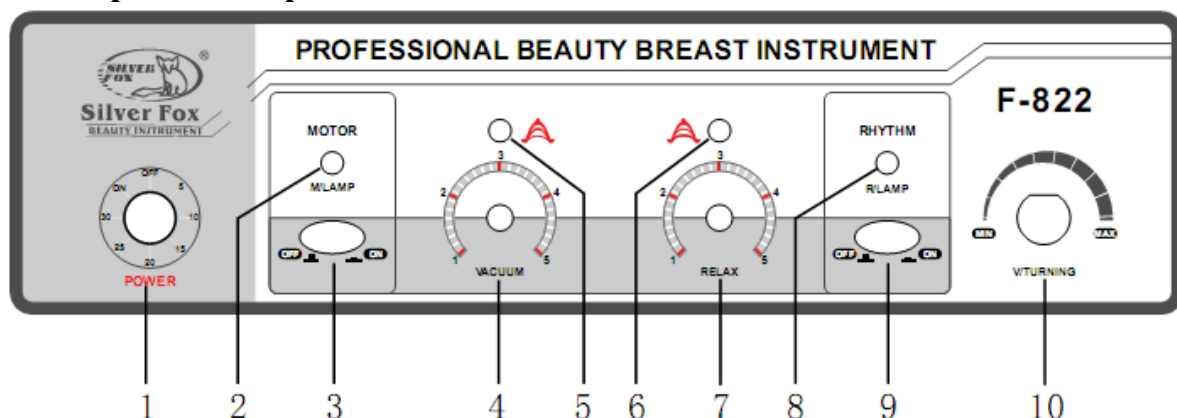


1. Glavni prekidač sa vremenom “**POWER**”

2. Statusna lampica motora “**M/LAMP**”

3. Prekidač za motor “**MOTOR**”

4. Kontroliranje vremena usisavanja "VACUUM"
5. Statusna radna lampica usisavanja
7. Kontroliranje radnog vremena opuštanja "RELAX"
9. Prekidač za ritam "RHYTHM"
6. Statusna lampica relaksiranja
8. Statusna lampica za ritam "R/LAMP"
10. Jačina usisavanja volumena "V/TURNING"

Uvod u pozadinsku ploču aparata

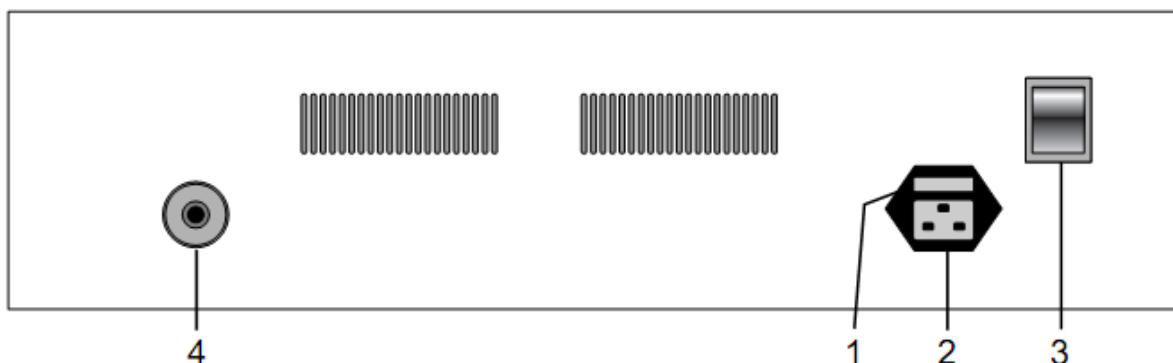

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. Kutija | 2. Utikač za struju |
| 3. Glavni prekidač | 4. Kolektor za vakuum. |

Tehničke specifikacije aparata

Voltaža: A.C. 220V

Frekvencija: 50/60Hz

Maximum struja: 66W

Minimum usisavanja: 0.07 Mpa

Minimalno vrijeme suck/relax : 0.4s

Maksimalno vrijeme suck/relax: 7.5s

5. Način upotrebe

1. Pravilno spojite aparat, cijevi, čašice za grudi, čašu za masažu te čašu za stražnjicu.
 2. Okrenite podešavač volumena usisavanja V/TURNING na minimum MIN .
 3. Suprotno smjeru kazaljke na satu okrenite kontroler vremena usisavanja VACUUM na minimum, zatim okrenite kontroler vremena relaksacije RELAX na maksimum.
 4. Uključite glavni prekidač na pozadini aparata.
 5. Uključite tajmer prekidač POWER
 6. Uključite ritam prekidač RHYTHM
 7. Uključite motor prekidač MOTOR
- U ovom trenutku statusna lampica motora M/lamp će se upaliti kao i lampica za ritam i usisavanje te lampice relaks i usisavanja će se također upaliti.
8. Stavite čašicu za grudi na mjesto koje želite tretirati namjestite sve funkcije za potrebnu aplikaciju (V/TURNING VACUUM , RELAX).

6. Pažnja

1. Tretirano područje će se zacrveniti ali to je normalna reakcija; kozmetičar vam može pomoći laganom masažom.
2. Kozmetičar treba voditi računa pri odabiru odgovarajuće veličine čašice koja ovisi o klijentu koji se tretira, također treba paziti za vrijeme tretiranja i prilagođavati postavke prema reakcijama klijenata.
3. Nakon što ste završili sa radom prvo okrenite "V/TURNING" suprotno od smjera kazaljke na satu, ugasiite prekidač za motor "MOTOR" i prekidač za ritam "RHYTHM", zatim skinite čašice za grudi.

7.Upozorenje!

1. Izbjegavajte koristiti aparat neprestano na duži period vremena jer bi se mogao pregrijati i uzrokovati štetu.
2. Neophodno je očistiti dijelove tijela koje ćete tretirati prije tretmana kako biste izbjegli usisavanje nečistoća u aparat jer biste ga na taj način mogli oštetiti.
3. Zabranjeno je otvaranje aparata. Ukoliko imate potrebu kontaktirajte prodajnog agenta za popravku.

8. Lista dijelova

Naziv dijela	Količina	Naziv dijela	Količina	Naziv dijela	Količina
F-822 glavni aparat	1 kom	Čašica za podizanje stražnjice	2 kom	Trosmjerna cijev	1 kom
Čašica za velike grudi	2 kom	Velika čašica za masažu bradavica	2 kom	Jednosmjerna cijev	1 kom
Čašica za srednje grudi	2 kom	Mala čašica za masažu bradavica	2 kom		
Čašica za male grudi	2 kom	Kabel	1 kom		
Upute	1 kom	Garancijska kartica	1 kom		