


SFP02

Ručni visoko-frekvencijski aparat

Uputstvo



Dijelovi

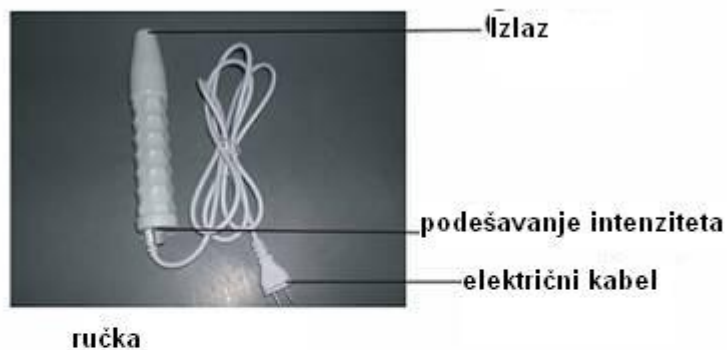

Glavne upute

Visoko-frekvencijska elektroterapija aparat je veoma važan kozmetički aparat. Kroz staklenu elektrodnu cijev producira visoko frekvencijsku struju koja se aplicira na lice i postiže tretmanske rezultate.

1. Smiruje živce i ima ljekoviti učinak
2. Producira ozon sterilizatoru i na taj način liječi rane i sužava pore
3. Pospješuje otpornost kože i PH vrijednost te daje potrebnu ravnotežu
4. Ubrzava metabolizam kože i cirkulaciju krvi
5. Ima funkciju za tretiranje bora i djeluje protiv znakova starenja na licu

Način upotrebe

1. Indirektna metoda:

- (1). Zavrnite cijevi na ručku.
- (2). Zamolite klijenta da drži staklenu cijev nakon što je ruke naprašio puderom. Upalite aparat i struja će proći kroz ruke u cijelo tijelo.
- (3). Kozmetičar aplicira masažu na klijentovo lice, od vrata do brade i od brade do obraza i čela.
- (4). Molimo vas da namjestite intenzitet na "0". Osigurajte da je aparat isključen i uzmite staklene cijevi iz ruku klijenta. Ova metoda odgovara suhoj i starijoj koži.

2. Direktna metoda:

(1). Namažite kremu na klijentovo lice zatim držite metalnu šipku kako biste stavili staklenu cijev na klijentovo lice. Uključite aparat.

(2). Masirajte lice sa staklenom cijevi s pokretima u obliku slova Z. Tretirajte na sljedeći način: čelo→nos→desna strana lica→brada→lijeva strana lica→nos→čelo

(3). Namjestite jačinu na 0. Isključite aparat i sklonite staklenu cijev.

Ova metoda se koristi za prirodno masnu kožu.

3. Metoda tretiranja iskricama

(1). Prekrijte klijentovo lice sa mokrom tkaninom I dodirujte upaljeni dio kože sa staklenom cijevi. Za početak tretman bi trebao biti kraći od 10 sekundi.

(2). Normalno je da se pojave iskrice kada staklena cijev dotakne lice.

(3). Namjestite jačinu na 0. Isključite aparat i sklonite staklenu cijev.

Ova metoda se koristi osjetljive, upaljene i ozlijeđene kože.

4. Metoda njegovanja kose:

(1). Koristite češljastu cijev.

(2). Prema smjeru rasta kose pomjerajte češljastu cijev.

(3). Namjestite intenzitet na "0". Osigurajte se da ste isključili aparat i izvadite cijev iz ručke. Ova metoda je za stimuliranje površine kože, reduciranje peruti i poboljšavanje zdravog rasta kose.

Napomena:

1. Kada koristite tretman metodom sa iskricama na osjetljivoj koži koristite tanku tkaninu kako biste pokrili klijentovo lice. Neka električna energija prođe u kožu kroz tkaninu, na ovaj način sprječavate oštećenje kože električnom energijom.
2. Zabranjeno je koristiti ovu metodu na osobama koje imaju metal u sebi ili su u drugom stanju.
3. Prije nego što počnete sa radom prvo postavite staklenu cijev zatim pokrenite aparat, električna energija treba biti podešavana od slabije prema jačoj. Kada završite sa tretmanom naštimate električnu energiju na 0.
4. Prije tretmana, prekrijte oči klijenta sa mokrim pamukom ili zamolite klijenta da zatvori oči. Kod metode iskricama tretman ne smije biti duži od 10 sekundi znači svakih 10 sekundi prekidate pa nastavljate tretman.
5. Tretman se ne koristi za fleke i mrlje.

Lista dodataka

Naziv	Mjera	Količina	Napomena
Ručka	Set	1	
Staklena cijev	Set	1	sa 4 komada
Uputstvo	kom	1	

Tehnički standardi:

Voltaža: AC □110V □220V □230V □240V

Radna frekvencija: 50-60HZ

Snaga: 10W

Dimenzije: 33x21x6CM

Težina.: 1 KG

Važno sigurnosno upozorenje

1. Molimo vas da ne rastavljate aparat i ne izvodite neke druge radnje koje nisu indicirane u našem uputstvu. Sve popravke trebaju izvršiti stručnjaci.
2. Nemojte sastavljati opremu ili rukovati s njom dok ste u blizini vode ili su vam ruke vlažne. Imajte na umu da ne smijete namakati aparat u tekućinu.
3. Izvadite kabel iz utikača kada se nađete u sljedećim situacijama. Nazovite servis.
 - Oprema je dotaknula tekućinu.
 - Oprema ispušta čudan i neugodan miris, proizvodi čudan zvuk i jaku buku.
 - Kabel je slomljen
 - Oprema je pala i polomila se
4. Ne stavljajte ništa na kabel i sklonite sa mjesta gdje bi netko mogao stati na njega.
5. Izvucite kabel nakon što ste završili sa radom.
6. Ne stavljajte ništa u utikače opreme jer biste mogli prouzrokovati požar ili elektricitet. Ako vam nešto uđe u opremu ne vadite sami nego kontaktirajte dobavljača.
7. Ne stavljajte opremu na bilo što, što je nestabilno kako se ne bi izvrnula i oštetila.
8. Naša firma zadržava pravo da modificira ovo uputstvo bez obavještanja! Zadržite upute zbog gore navedenih razloga.

