



Sustav za anti-age tretmane lica

Upute za uporabu – T7

Poštovani korisnici,

Hvala vam što ste odabrali naš proizvod.

Radi postizanja najboljih performansi i sigurne uporabe, molimo da prije korištenja pažljivo pročitate ove upute.

Upute sačuvajte za buduću uporabu i referencu.

Sadržaj:

1. Izbornik sustava i nastavci
2. Upute za povezivanje nastavaka
3. Podešavanje sustava i svakodnevno održavanje
4. Tetovaže
5. Rješavanje kvarova i parametri
6. Popis pakiranja
7. Važne sigurnosne napomene.

Sustav i nastavci



Slika 1-1

Stražnja strana uređaja



Slika 1-2

II. Priključivanje nastavaka




Slika 1-3

◆ Priključivanje



Slika 1-4


◆ Priključivanje

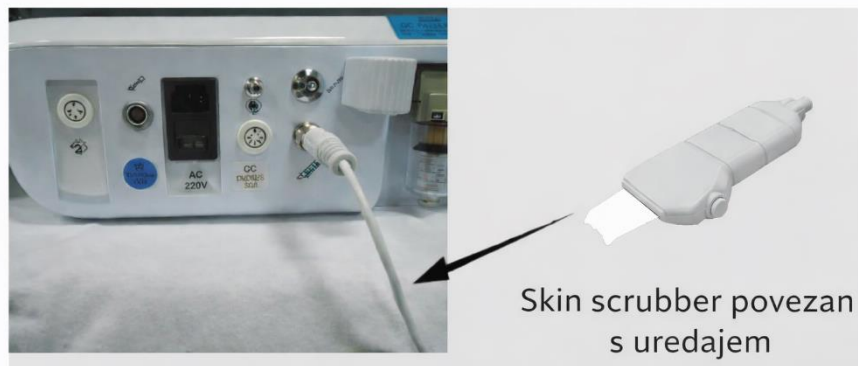

Slika 1-5



Slika 1-6

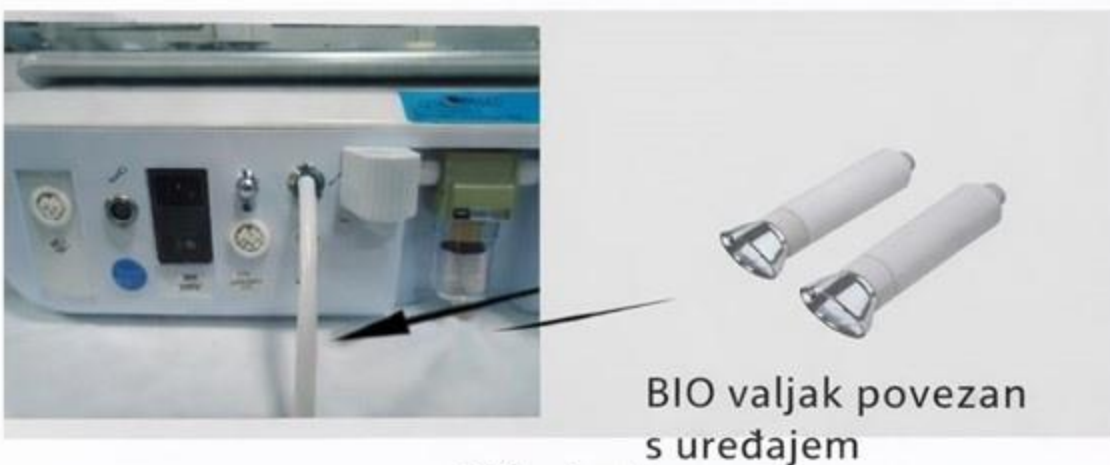

Slika 1- 7



Slika 1-8

◆ Priključivanje nastavaka



Hladni čekić povezan s uređajem

Slika 1-9



Dermaabrazija povezana s uređajem

Slika 1-10



Nastavak za mezoterapiju lica povezan s uređajem

Slika 1-11

III. Podešavanje sustava i svakodnevno održavanje

1. Uključite glavni uređaj
2. Spojite glavni uređaj s naponskim kabelom, uključite prekidač, pokrenite sustav, zaslon je prikazan kao ispod

SUSTAV ZA POMLAĐIVANJE LICA



1. Dermoabrazija

Smanjuje tanke linije i bore, „crow's feet“, pigmentacijske mrlje i ožiljke od akni. Potiče obnovu kože i proizvodnju kolagena.



2. Ultrazvučni čistač (Scrubber)

Ultrazvučno čišćenje kože. Uklanja nečistoće, mitesere i mrtve stanice, zaglađuje kožu i poboljšava tonus.



3. Bipolarna RF

Potiče regeneraciju kolagena. Zateže kožu, poboljšava elastičnost te smanjuje bore i znakove starenja.



4. Mezoterapija – lice

Potiče unos hranjivih tvari u kožu. Povećava vlažnost, elastičnost i opskrbu kože hranjivim sastojcima.



5. Mezoterapija – oko očiju

Smanjuje tanke linije, bore i tamne podočnjake. Poboljšava apsorpciju hranjivih tvari na području oko očiju.



6. Hladni tretman (Hladni čekić)

Smiruje i obnavlja kožu. Smanjuje crvenilo, zatvara pore te ublažava iritacije i osjetljivost kože.



7. BIO valjak


Oblikovanje i zatezanje lica. Smanjuje bore, potiče proizvodnju kolagena, povećava vlažnost i poboljšava konture lica.



8. BIO okrugli nastavak


Zatezanje i oblikovanje kontura. Smanjuje natečenost, potiče kolagen i poboljšava tonus i elastičnost kože.

3. Pritisnite funkciju nastavka kako biste povezali odabrani nastavak; zaslone će se prikazati kao ispod:

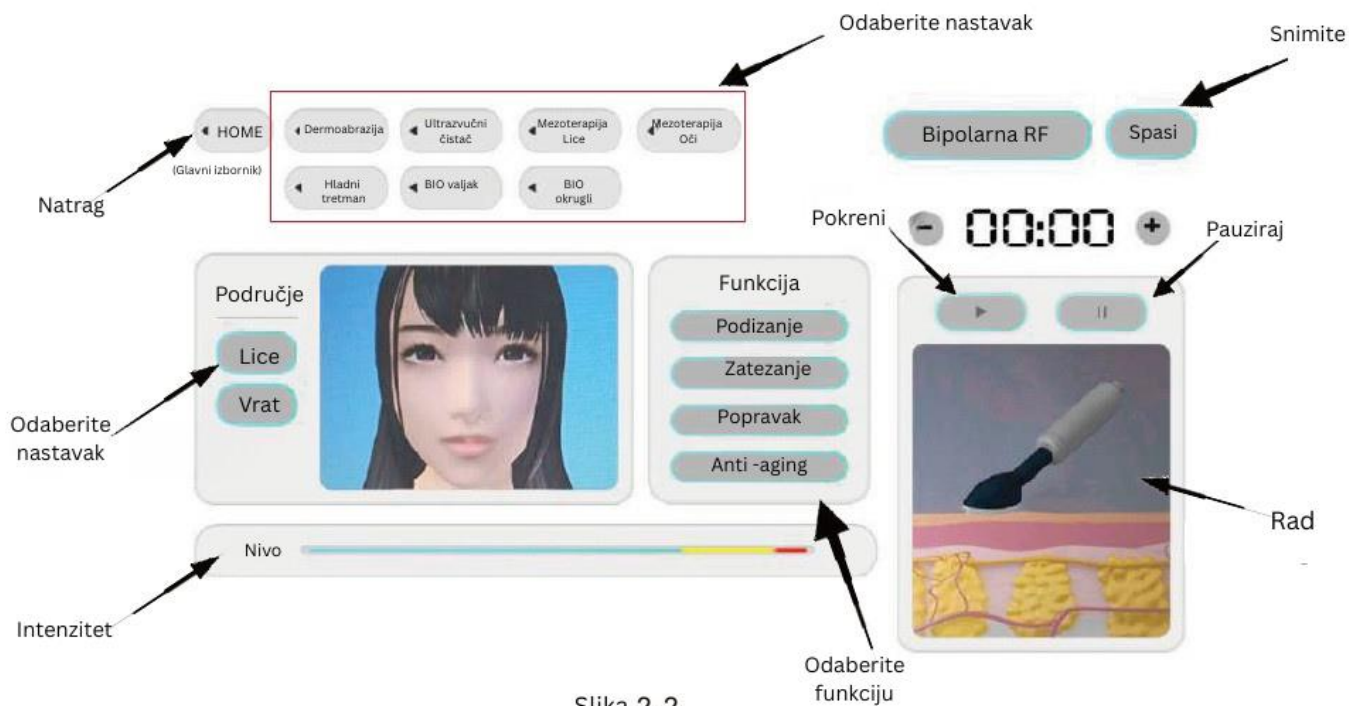


Slika 2-2

4. Odaberite područje, odaberite funkciju, postavite način rada vremena i intenzitet.

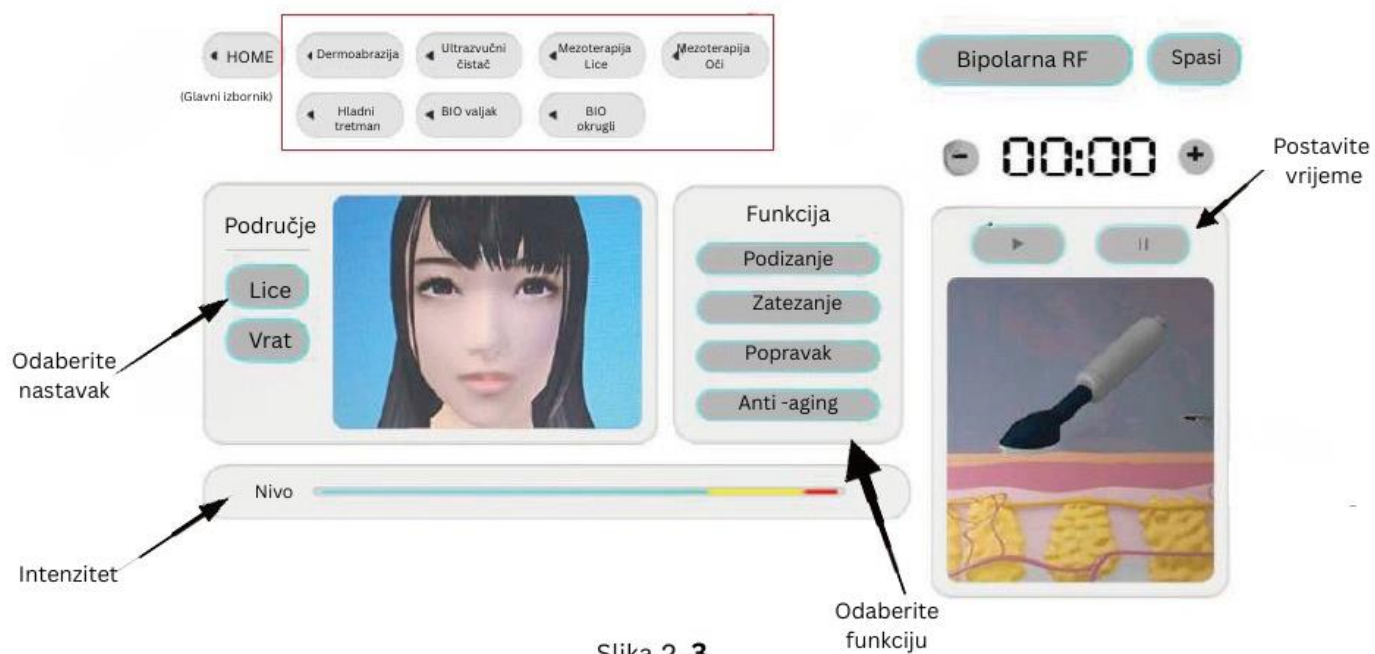

Slika 2-3

5. Nakon postavljanja parametara pritisnite Start i započnite s radom.

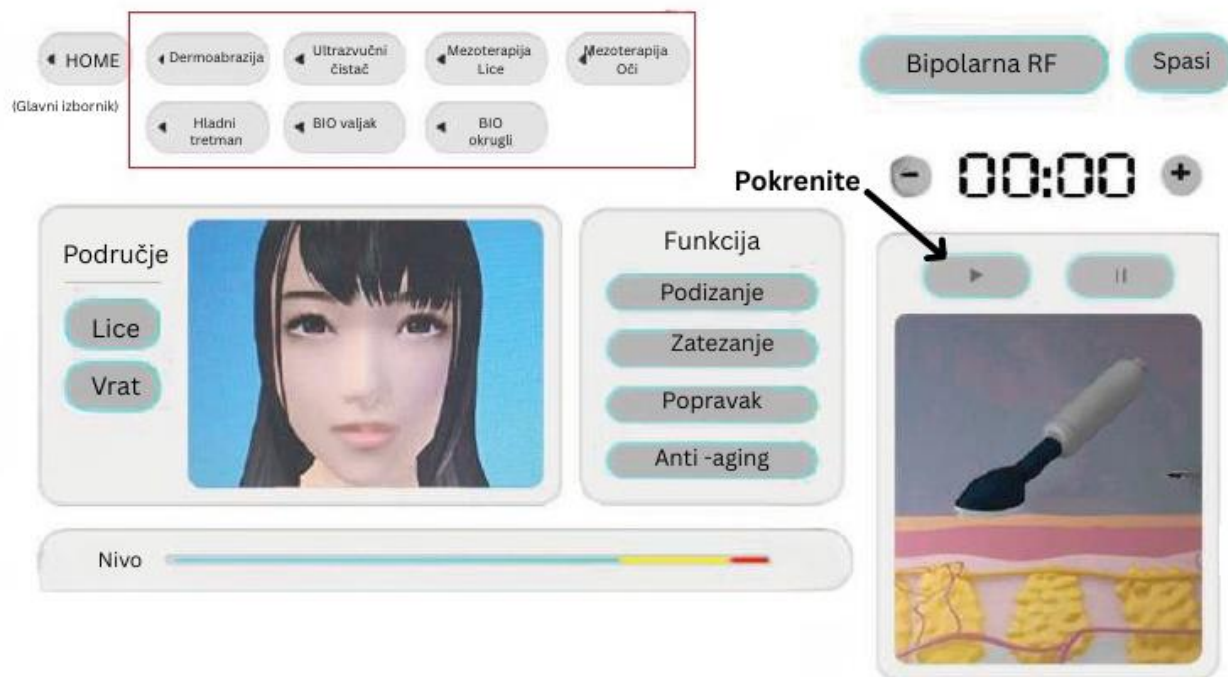

Slika 2- 4

6. Pritisnite **Saving** , odaberite “Yes” (“Da”) i spasite/ snimite podatke.



Slika 2-5

Upozorenje:

Kako biste izbjegli nepotrebne ozljede, tijekom rada nastavke je potrebno stalno pomicati po površini kože.


Zabranjeno je zadržavati radni nastavak na jednom mjestu na koži tijekom duljeg vremena.

7. Korak podešavanja frekvencije ultrazvučnog čistača:

Uključite napajanje kako bi se prikazao glavni izbornik.

Kliknite gornji desni kut glavnog izbornika za ulazak u stranicu za podešavanje frekvencije

ultrazvučnog čistača te prilagodite frekvenciju  i spasite podatke

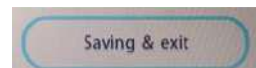

kao na slici:



Slika 2-6

Koraci rada dermoabrazije




Lice

Podešavanje vremena rada na 15–20 minuta; odabir područja i funkcije; podešavanje razine vakuumu prema podnošljivosti klijenta, kako slijedi:



3. Lice — pomičite sondu kao što je prikazano na slici:

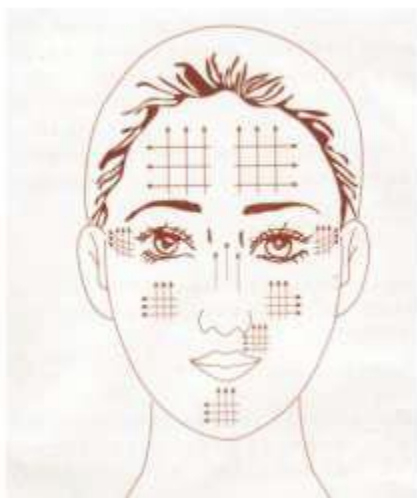

(1) Ako je osjećaj usisavanja preslab, tijekom rada potrebno je ponovno zamijeniti filter.

Različite vrste filtera odabiru se prema debljini kože na različitim područjima i različitim veličinama.

Nakon svakog tretmana filtre je potrebno zamijeniti novima, a uklonjena (ljuštena) koža može se pokazati klijentu.

(2) Provjerite jesu li filteri pravilno postavljeni. Na metalni spoj cjevčice možete nanijeti malo čvrstog maziva, poput vazelina i sl.

(3) Nastavci za dermoabraziju dostupni su u različitim veličinama. Taktilnim i vizualnim pregledom procijenite postoji li regionalno zadebljanje kože. U pravilu se tretman započinje grubljim nastavkom, a zatim se nastavlja finijim nastavkom.

(4) Podešavanje usisavanja:

Što je koža tanja, razina usisavanja mora biti niža. Za područja poput podočnjaka, "crow's feet" (bora oko očiju) i slično, potrebno je postaviti najnižu razinu usisavanja.

(5) Prije početka tretmana testirajte jačinu usisavanja na ruci ili podlaktici kako biste dobili ujednačeno usisavanje na površini kože.

Budite oprezni i ne zadržavajte dijamantni nastavak na jednom području dulje od 15 sekundi, jer previsoki tlak može uzrokovati otekline ili krvarenje. Posebno obratite pozornost na osjetljivu kožu.

(6) Nakon tretmana, dijamantne nastavke očistite četkicom i vodom. Nakon čišćenja, uronite ih u otopinu koja sadrži 75 % alkohola na 15 minuta, zatim ih izvadite i potpuno osušite.

Nakon toga, nastavke stavite u UV sterilizator do sljedeće uporabe.

Napomena:

Gore navedeni podaci služe isključivo kao smjernice. Tijekom tretmana potrebno je stalno komunicirati s klijentom i prilagođavati postavke prema stvarnom osjećaju i reakciji kože klijenta.

Koraci rada ultrazvučnog čistača (Scrubber)

Lice



1. Odabir nastavka za ultrazvučni čistač.

2. Podešavanje vremena rada na 15–20 minuta; odabir područja, funkcije i načina rada; podešavanje razine jačine prema podnošljivosti klijenta, kako slijedi:




3. Ultrazvučni čistač kože jedan je od najpopularnijih uređaja među kozmetičarima u okviru multifunkcionalnih aparata. Dugogodišnja primjena potvrdila je njegov izniman učinak u njezi lica.

Uređaj pretvara električne vibracije frekvencije 28.000 puta u sekundi u mehaničke vibracije iste frekvencije. Ultrazvučni prodorni učinak istovremeno masira i čisti kožu, dok se dubinske stanice stimuliraju.


Učinkovito uklanja mrlje, bore, prištiće, rožnati sloj i ostatke nečistoća iz pora, čineći kožu svjetlijom, čistijom i elastičnijom.

Ultrazvučna masaža

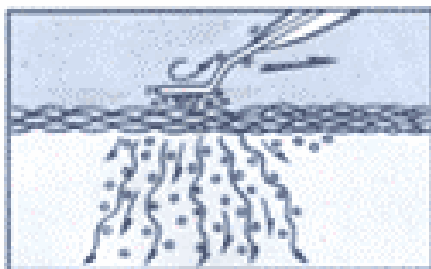

Slika 1

Uklanjanje bora

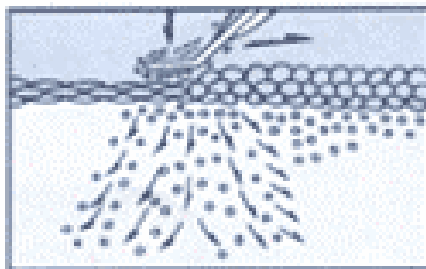

Slika 2

Peeling



Slika 3

Uklanjanje melanina



Slika 4



Napomena:

Gore navedeni podaci služe isključivo kao smjernice. Tijekom tretmana potrebno je stalno komunicirati s klijentom i prilagođavati postavke prema stvarnom osjećaju klijenta.

Koraci rada bipolarne RF

Lice



1. Odabir nastavka za bipolarnu RF.
2. Podešavanje vremena rada na 15–20 minuta; odabir područja i funkcije; podešavanje razine jačine prema podnošljivosti klijenta, kako slijedi:



3. Prije početka rada nanesite odgovarajući medij na tretirano područje.

Lice — pomičite sondu kao što je prikazano na slici:



Napomena:

Gore navedeni podaci služe isključivo kao smjernice. Tijekom tretmana potrebno je stalno komunicirati s klijentom i prilagođavati postavke prema stvarnom osjećaju klijenta.

Zabranjeno je zadržavati nastavak na istom mjestu na koži tijekom duljeg vremena.


Vrat

1. Podešavanje vremena rada na 15–20 minuta; odabir područja i funkcije; podešavanje razine jačine prema podnošljivosti klijenta, kako slijedi:



2. Prije početka rada nanosite odgovarajući medij na tretirano područje.

Vrat — pomičite sondu kao što je prikazano na slici:

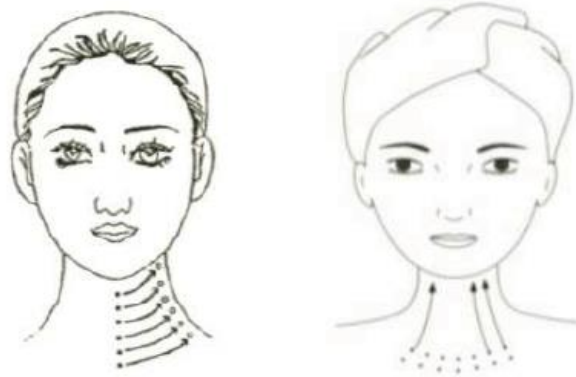

Gore navedeni podaci služe isključivo kao smjernice. Tijekom tretmana potrebno je stalno komunicirati s klijentom i prilagođavati postavke prema stvarnom osjećaju klijenta.

Zabranjeno je zadržavati nastavak na istom mjestu na koži tijekom duljeg vremena.

Mezoterapija – lice

Lice



1. Odabir nastavka za mezoterapiju lica.
2. Podešavanje vremena rada na 15–20 minuta; odabir područja i funkcije; podešavanje razine jačine prema podnošljivosti klijenta, kako slijedi:





Prije rada nanosite proizvod za njegu kože na tretirano područje ili ulijte proizvod za njegu kože u bočicu u dršci. Kao što je prikazano na slici:



(Zakretanjem drške izvucite bočicu te u nju ulijte odgovarajući proizvod.)

Lice — pomičite sondu kao što je prikazano na slici:

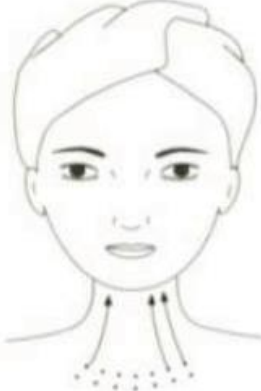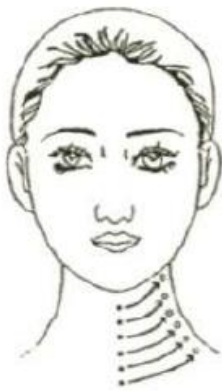

Napomena: Gore navedeni podaci služe isključivo kao referenca. Tijekom tretmana komunicirajte s klijentom i prilagodite postavke prema njegovom stvarnom osjećaju.

Mezoterapija – područje oko očiju

Oči


Odaberite nastavak za mezoterapiju za područje oko očiju.

Podesite vrijeme rada na 10–15 minuta; odaberite područje, funkciju i način rada; razinu jačine prilagodite prema toleranciji klijenta.

Kao što je prikazano u nastavku:



Oči — pomičite sondu kao što je prikazano na slici:

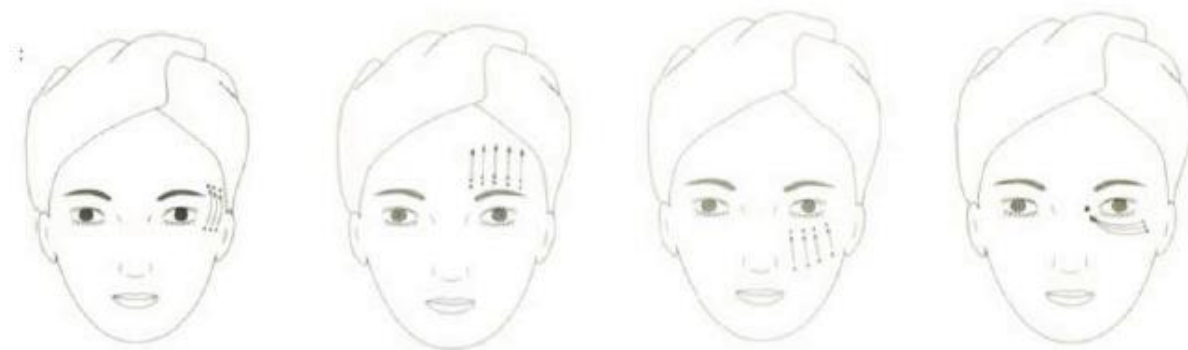

Napomena: Gore navedeni podaci služe isključivo kao referenca. Tijekom tretmana komunicirajte s klijentom i prilagodite postavke prema njegovom stvarnom osjećaju.

Koraci izvođenja hladnog tretmana

Lice

Odaberite nastavak za hladni tretman.



Podesite vrijeme rada na 10–15 minuta; odaberite područje, funkciju i način rada; razinu jačine prilagodite prema toleranciji klijenta. Kao što je prikazano u nastavku:



Lice — pomičite sondu kao što je prikazano na slici:



Koraci izvođenja BIO Roller tretmana

Lice

1. Odaberite BIO Roller nastavak.
2. Podesite vrijeme rada na 10–15 minuta; odaberite područje, funkciju i način rada; razinu jačine prilagodite prema toleranciji klijenta.

Kao što je prikazano u nastavku:



3. Upute za rad

1. Izvodite pokrete radi poticanja mišića u središnjem dijelu čela. Dvije sonde istovremeno pomičite od sredine čela prema obrvama. U području početka obrva kratko se zadržite i lagano pritisnite. Postupak ponovite 3–5 puta.

Nakon svakog pokreta, sonde se pomiču naizmjenično uz stalni kontakt s kožom. Tijekom cijelog tretmana održavajte ujednačen i kontinuiran rad.

2. Izvodite pokrete u području donje usne, brade i oko usta s ciljem poboljšanja izgleda kože. Pokrete izvodite uz lagani pritisak, u smjeru prema gore i prema dolje. Postupak izvodite zasebno za svaku stranu lica te ponovite 3 puta na lijevoj i 3 puta na desnoj strani.



3. Površinski tretman kože radi poboljšanja izgleda vertikalnih linija. Pokrete izvodite u jednom smjeru uz lagani i ujednačen pritisak. Jedna sonda služi kao oslonac, dok se druga pomiče od područja brade prema dolje, tri puta. Nakon toga sonda se vodi od brade uz kut usana prema području jagodice, uz blagi pritisak.



4. Tretman područja oko usta. Pokrete izvodite jednousmjerno uz lagani pritisak. Jedna sonda ostaje postavljena, dok se druga pomiče od kuta usana prema gore, zatim se vraća u početni položaj prije nastavka sljedećeg pokreta. Postupak ponovite 3–5 puta.



5. Tretman područja oko usta uz kontrolirane, jednousmjerne pokrete. Jedna sonda ostaje na mjestu, dok se druga pomiče od kuta usana prema bočnom dijelu nosa. Postupak ponovite 3–5 puta. Napomena: sonde se ne smiju međusobno dodirivati.



6. Tretman područja oko usana. Pokrete izvodite u jednom smjeru uz lagani pritisak. Jedna sonda ostaje postavljena, dok se druga pomiče od područja uz usne prema gore. Postupak ponovite 3–5 puta.



7. Tretman donjeg dijela lica. Pokrete izvodite dvosmjerno uz umjeren i kontroliran pritisak. Jedna sonda se postavlja ispod područja jagodice, dok se druga pomiče preko područja čeljusti. Pokrete izvodite od vanjskog prema unutarnjem dijelu lica, ukupno 4 puta.



8. Vježba za m. orbicularis oris
(zaglađivanje nazolabijalnih bora)

Primjenom jednosmjernog izvlačenja, jedna sonda se postavlja na akupunkturnu točku Yingxiang (LI20 – uz nosnicu) i služi kao dvostruki potisak, dok se druga sonda pomiče duž točaka:

Chengqi (ST1 – ispod oka)

Chengying (ST4 – kut usana)

Juliao (ST3 – jagodična regija)

Tongziliao (GB1 – vanjski očni kut)

Trajanje: 4 minute.



9. Vježba za m. masseter
(zaglađivanje bora donje čeljusti)

Primjenom dvosmjernog izvlačenja, jedna sonda se postavlja s unutarnje (medijalne) strane mišića obraza, dok se druga postavlja na m. masseter; sonde se pomiču od lateralne prema medijalnoj strani, ukupno 2 ponavljanja.



10. Vježba za m. zygomaticus major et minor
(zaglađivanje linija donje čeljusti i obraza)

Primjenom dvosmjernog izvlačenja, jedna sonda djeluje na akupunkturne točke:

Chengqi (ST1)

Juliao (ST3)

Dok druga sonda zahvaća m. zygomaticus major et minor; sonde se pomiču izvana prema unutra, 2 ponavljanja.



11. Vježba za galea aponeurotica i mm. frontales


(zaglađivanje glabelarnih bora – bora između obrva)

Primjenom jednosmjernog izvlačenja, jedna sonda se postavlja 1 cm iznad lateralnog kraja obrve, dok se druga sonda pomiče u luku od točke:

Juliao (ST3)

Izvodi se 3 puta u luku i 3 puta ravno.

Istovremeno jedna sonda pruža potisak prema gore, dok druga sonda djeluje neovisno, bez međusobnog dodira.

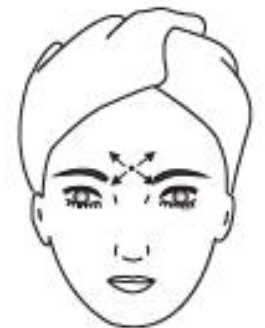

12. Vježba za mišiće oko usana
(zaglađivanje središnjih bora)

Primijeniti dvosmjerno povlačenje s blagim pritiskom.
Sonde povlačiti vodoravno:

-jednom u jednom smjeru

-jednom kružno u smjeru kazaljke na satu

Kretati se od središta usana prema kutovima usana.
Izvesti svaki pokret po jednom.



13. Vježba za mišiće čela
(zaglađivanje bora na čelu)

Primijeniti dvosmjerno povlačenje s pritiskom.

Dvije sonde povlačiti gore–dolje od sredine čela, zatim pomaknuti
lijevo ili desno.

Izvoditi kontinuirano 5–6 minuta.



14. Vježba za kružni mišić oka
(zaglađivanje središnjih bora)

Primijeniti dvosmjerno povlačenje s pritiskom.

Dvije sonde povlačiti od unutarnjeg prema vanjskom dijelu oka,
zatim lagano podignuti.

Pokret ponoviti 3–5 puta.



15. Vježba za podizanje mišića čela
(zaglađivanje bora na čelu)

Primijeniti jednosmjerno izvlačenje.

Jednu sondu postaviti 1 cm iznad obrve, drugom sondom zahvatiti liniju kose i povlačiti.

Objе sonde pomicati lijevo ili desno.

Trajanje: 5–6 minuta.



16. Vježba za podizanje obrva
(zaglađivanje bora između obrva)

Primijeniti dvosmjerno izvlačenje.

Jednu sondu postaviti na vrh obrve, drugu postaviti ispod obrve i povlačiti prema gore.

Kretati se od početka obrve prema kraju obrve.

Trajanje: 5 minuta.



17. Vježba za zatezanje područja ispod oka
(zaglađivanje bora i podočnjaka)

Primijeniti jednosmjerno povlačenje s blagim pritiskom.

Jednu sondu postaviti uz vanjski kut oka, a drugu sondu povlačiti ispod oka pod kutom od 45°, izvana prema unutra.

Pokret izvesti 3–5 puta.



18. Vježba za zatezanje područja iznad oka
(zaglađivanje bora i podočnjaka)

Primijeniti jednosmjerno povlačenje s blagim pritiskom. Jednu sondu postaviti uz vanjski kut oka, a drugu sondu povlačiti iznad oka pod kutom od 45°, izvana prema unutra. Pokret izvesti 3–5 puta.



Napomena:

Navedeni podaci služe isključivo kao smjernice. Tijekom tretmana potrebno je komunicirati s klijentom i prilagoditi jačinu i način rada prema njegovom stvarnom osjećaju.

Vrat

1. Postavke tretmana

Vrijeme rada: 10–15 minuta.

Odaberi područje tretmana, funkciju i način rada.

Jačinu rada prilagoditi prema podnošljivosti klijenta.

Postupak:



2. Tretman protiv bora na vratu

Napomena: Tretman vrata izvodi se nakon završenog tretmana lica.

Postupak se ponavlja 6 puta.

Korak 1: Normalizacija

Odaberi nježni val.

Izvoditi 6 minuta s ukupno 8 pokreta.



Korak 2:


Ponoviti korak 1, ali izvoditi pokrete prema desnoj strani.

**Korak 3:**

Tretman mišića platysma za smanjenje podbratka.

Primijeniti dvosmjerno izvlačenje.


Sonde pomicati od donjeg dijela vrata prema gornjem, ravnomjernim i kontroliranim pokretima.

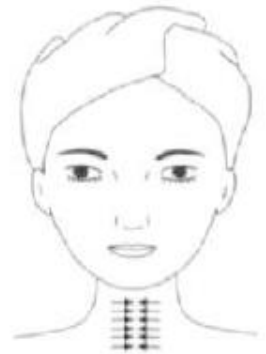**Korak 4:**

Tretman sternokleidomastoidnog mišića za zaglađivanje bora na vratu.

Primijeniti dvosmjerno izvlačenje.

Sonde pomicati od gornjeg prema donjem dijelu vrata, uz bočnu stranu vrata.

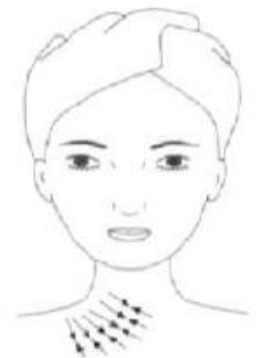**Korak 5:**

Ponoviti korak 4 na suprotnoj strani vrata.




Korak 6:

Istezanje mišića vrata.

Primijeniti dvosmjerno povlačenje s blagim pritiskom.

Dvije sonde pomicati istovremeno gore i dolje od sredine vrata, zatim se postupno pomaknuti s lijeva na desno.

Izvesti 10 ponavljanja.

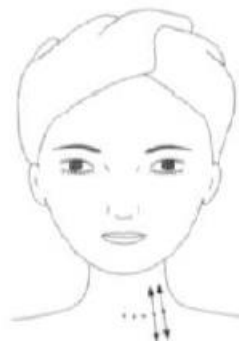
**Korak 7:**

Podizanje i učvršćivanje mišića vrata.

Primijeniti jednosmjerno izvlačenje.

Jednu sondu postaviti na gornji dio vrata, a drugom sondom povlačiti prema gore, krećući se s lijeva na desno.

Izvesti 10 ponavljanja.

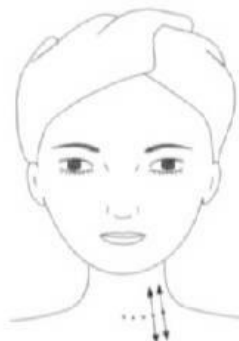**Korak 8:**

Tretman mišića vrata za zaglađivanje bora.

Primijeniti jednosmjerno povlačenje s pritiskom.

Jednu sondu držati stabilno, dok drugom sondom kliziti prema gore, krećući se s lijeva na desno.

Izvesti 10 ponavljanja.



Drugi korak: Jačanje elastičnosti mišića vrata

Odabrati pulsni val.

Trajanje: 8 minuta.

Izvesti 3 različita pokreta.

Treći korak: Dubinski tretman

Odabrati blagi val.

Trajanje: 3 minute. Izvesti 3 različita pokreta.

Napomena:

Postupak se izvodi na isti način kao koraci 6, 7 i 8 iz prvog dijela tretmana.

BIO – kružni nastavak (Roller)

Područje: Oči

1. Odabir nastavka

Postaviti BIO Roller nastavak.



2. Postavke tretmana

Vrijeme rada: 10–15 minuta.

Odabrati područje – oči.

Odabrati funkciju i način rada.

Jačinu rada prilagoditi prema podnošljivosti klijenta.


Postupak:



3. Vodič za izvođenje


(1) Zatezanje područja ispod oka (smanjenje bora i podočnjaka)

Primijeniti jednosmjerno povlačenje s blagim pritiskom.
Jednu sondu postaviti na vanjski kut oka.
Drugom sondom kliziti ispod oka pod kutom od 45°, od
vanjskog prema unutarnjem dijelu oka.
Pokret ponoviti 3–5 puta.

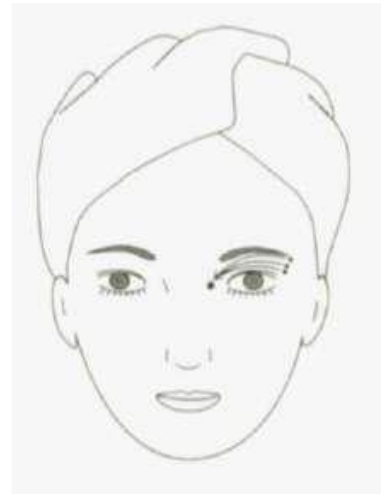

(2) Zatezanje područja iznad oka (smanjenje bora i podočnjaka)

Primijeniti jednosmjerno povlačenje s blagim pritiskom.
Jednu sondu postaviti na vanjski kut oka.
Drugom sondom kliziti iznad oka pod kutom od 45°, od
vanjskog prema unutarnjem dijelu oka.
Pokret ponoviti 3–5 puta.

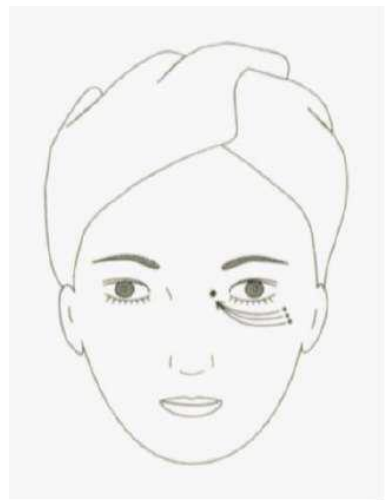


(3) Aktivacija mišića čeljusti (povećanje elastičnosti)

Primijeniti dvosmjerno izvlačenje.

Jednu sondu postaviti ispod jagodične kosti, a drugom sondom podizati mišić čeljusti, izvana prema unutra.

Pokret ponoviti 2 puta.

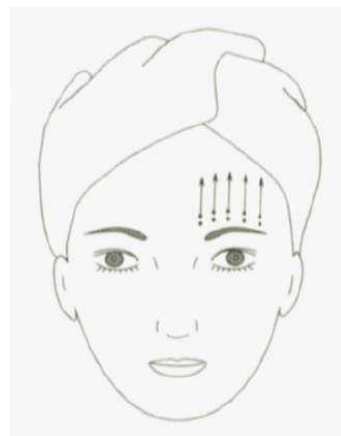


(4) Istezanje mišića oko oka (zaglađivanje središnjih bora)

Primijeniti dvosmjerno povlačenje s blagim pritiskom.

Dvije sonde istovremeno povlačiti od sredine obrve prema vanjskom dijelu oka, zatim lagano podignuti.

Pokret ponoviti 3–5 puta.

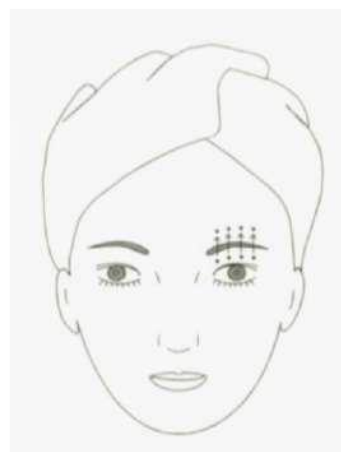


(5) Podizanje obrva (zaglađivanje bora između obrva)

Primijeniti dvosmjerno izvlačenje.

Jednu sondu postaviti na gornji rub obrve, a drugom sondom podizati ispod obrve prema gore.

Kretati se od početka obrve prema kraju obrve.

Trajanje: 5 minuta.

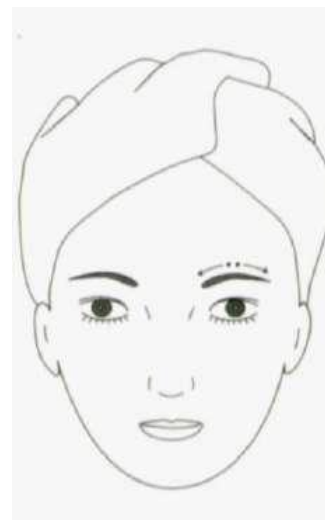

Napomena:

Navedeni podaci služe samo kao smjernice. Tijekom tretmana potrebno je stalno komunicirati s klijentom i prilagoditi jačinu, trajanje i način rada prema njegovom stvarnom osjećaju.

Upute za svakodnevno održavanje

- a. Održavati uređaj i nastavke čistima.
Čistiti ih mekom, blago vlažnom krpom.
- b. Ručke dezinficirati maramicom s 75 % alkohola
prije i nakon svakog korištenja.
- c. Zaslon podešavati laganim dodirima vrhovima prstiju.
- d. Radna temperatura: 5 – 55 °C.
- e. Vlažnost prostora: do 80 %.

IV. Kontraindikacije

Uređaj ne koristiti u sljedećim slučajevima:

- a. Osobe s pacemakerom ili ugrađenim defibrilatorom.
- b. Područja tijela s metalnim implantatima
(npr. zlatne niti, metalni zubi).
- c. Osobe s rakom kože ili prekanceroznim promjenama.

d. Osobe s teškim oblicima hipertenzije, dijabetesa, srčanih bolesti ili sličnih ozbiljnih stanja.

e. Trudnice i dojilje.

f. Područja tijela s bakterijskim ili virusnim infekcijama, otvorenim ranama ili upalama.

g. Područja tijela s trajnim filerima ili privremenim filerima (prije tretmana obavezno se savjetovati s liječnikom).

h. Ako je u posljednja 3 mjeseca provedeno:

- kemijsko pilingiranje (kiseline),
- laserski tretmani,
- resurfacing kože,
- tretmani zacjeljivanja rana.

i. Ako su u posljednja 2 mjeseca korišteni:

- lijekovi za razrjeđivanje krvi,
- izotretinoin (retinoična kiselina).

j. Zabranjeno je zadržavati radni nastavak na jednom mjestu na koži dulje vrijeme.

VI. Rješavanje kvarova i postavke parametara

Problem	Rješenje
Uređaj se uključi, ali nema reakcije	Provjeriti je li kabel za napajanje pravilno priključen na uređaj. Provjeriti je li prekidač za napajanje uključen.
Nema izlaznog djelovanja	Provjeriti je li nastavak pravilno i čvrsto spojen na izlazni priključak uređaja.
Uređaj se pregrijava tijekom rada	Ako je uređaj radio predugo, isključiti ga i ostaviti da se prirodno ohladi . Provjeriti je li napon električne mreže odgovarajući (provjeru mora obaviti stručna osoba).
Uređaj se ne uključuje	Provjeriti osigurač. Ako je oštećen, zamijeniti ga novim .

Napomena:

Kako bi se izbjegle smetnje u radu, nemojte koristiti dvije ili više funkcija istovremeno.

Veličina pakiranja: 77 × 45 × 35 cm

Napon: 220 V / 50 Hz

Snaga: 75 W

Električna struja: 2 A

Neto težina: 12 kg

Bruto težina: 15 kg

VII. Sadržaj pakiranja

Naziv	Količina
Glavni uređaj	1 kom
Nastavak za mezoterapiju – lice	1 kom
Nastavak za mezoterapiju – oči	1 kom
BIO Round nastavak	1 kom
BIO Roller nastavak	1 kom
Bipolarni RF nastavak	1 kom
Hladni čekić	1 kom
Dermoabrazijski nastavak	1 kom
Skin scrubber nastavak	1 kom
Kutija za dermabraziju	1 kom
Cijev	1 kom
Polica	1 kom
Potporna šipka	2 kom
Vijak	2 kom
Ključ	1 kom
Kabel	1 kom
Osigurač	2 kom
Upute za uporabu	1 kom

VIII. Važne sigurnosne napomene

Uređaj smije koristiti isključivo stručno osposobljena kozmetičarka.

Ne rastavljati uređaj niti ga koristiti na način koji nije opisan u ovim uputama.

Sve popravke i održavanje smije obavljati samo ovlašteni servisni tehničar.

Ne postavljati niti koristiti uređaj mokrih ruku ili u blizini vode, kako bi se izbjeglo prskanje ili prodor tekućine u uređaj.

Odmah isključiti uređaj iz struje i obratiti se servisnom centru u sljedećim slučajevima:

- a) tekućina se prolila po uređaju ili je uređaj došao u kontakt s vodom ili kišom
- b) pojavljuje se neobičan miris, dim, para ili neuobičajena buka
- c) uređaj je pao ili je kućište oštećeno
- d) kabel za napajanje je oštećen ili oguljen

Ne stavljati predmete na kabel za napajanje niti postavljati uređaj na mjesto gdje se kabel može gaziti ili pritiskati.

Nakon završetka rada uvijek isključiti uređaj iz električne mreže.

Ne umetati nikakve predmete u otvore uređaja, jer postoji opasnost od požara ili strujnog udara.

Ako neki predmet upadne u otvor i ne može se ukloniti, odmah isključiti uređaj iz struje i kontaktirati prodavatelja ili ovlašteni servis.

Ne postavljati uređaj na nestabilna kolica, police ili vozila, jer pad može uzrokovati oštećenje uređaja.

Kako bi se produžio vijek trajanja uređaja, razmak između isključivanja i ponovnog uključivanja mora biti najmanje 1 minuta.

Napajanje mora odgovarati tehničkim specifikacijama navedenim na naljepnici uređaja.

Neodgovarajući napon može uzrokovati nepravilan rad ili trajno oštećenje uređaja.

Proizvođač zadržava pravo izmjene i dopune ovog priručnika, kao i pravo konačnog tumačenja navedenih informacija.

Ovaj uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina te osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, isključivo uz nadzor i ako su upoznate s pravilnom i sigurnom uporabom.

Djeci nije dopušteno igrati se uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.