


PIB-6000

Upute - aparat za mikrodermoabraziju



Kontrolna ploča i pribor

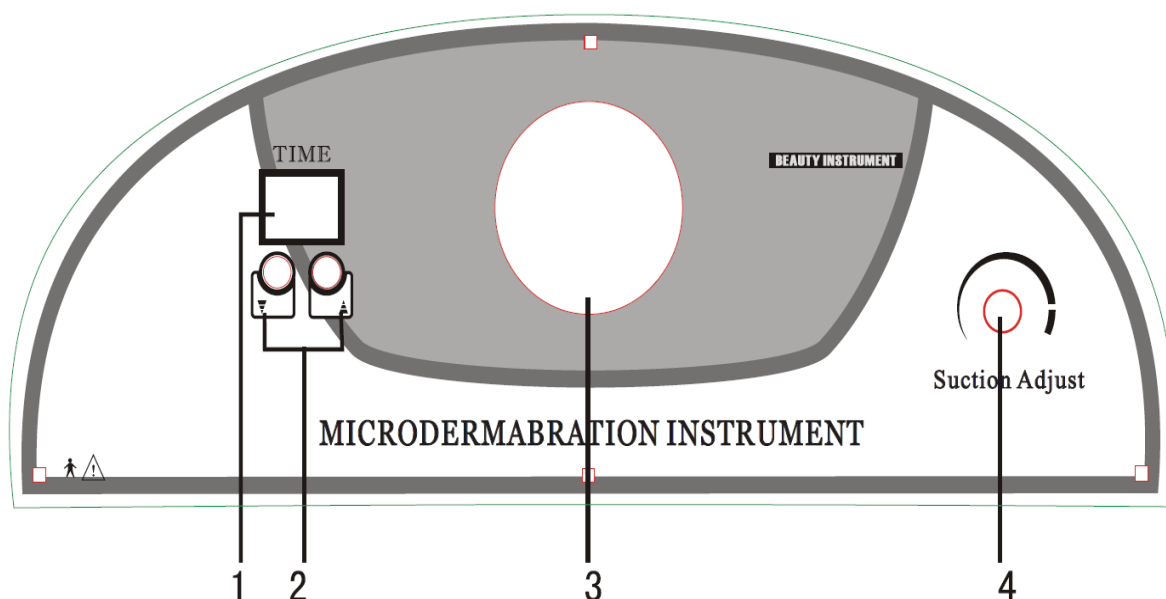


1. Vrijeme rada

2. Postavke vremena rada

3. Prikaz usisavanja


4. Postavke usisavanja

• Dijamantska mikrodermoabrazija - pribor

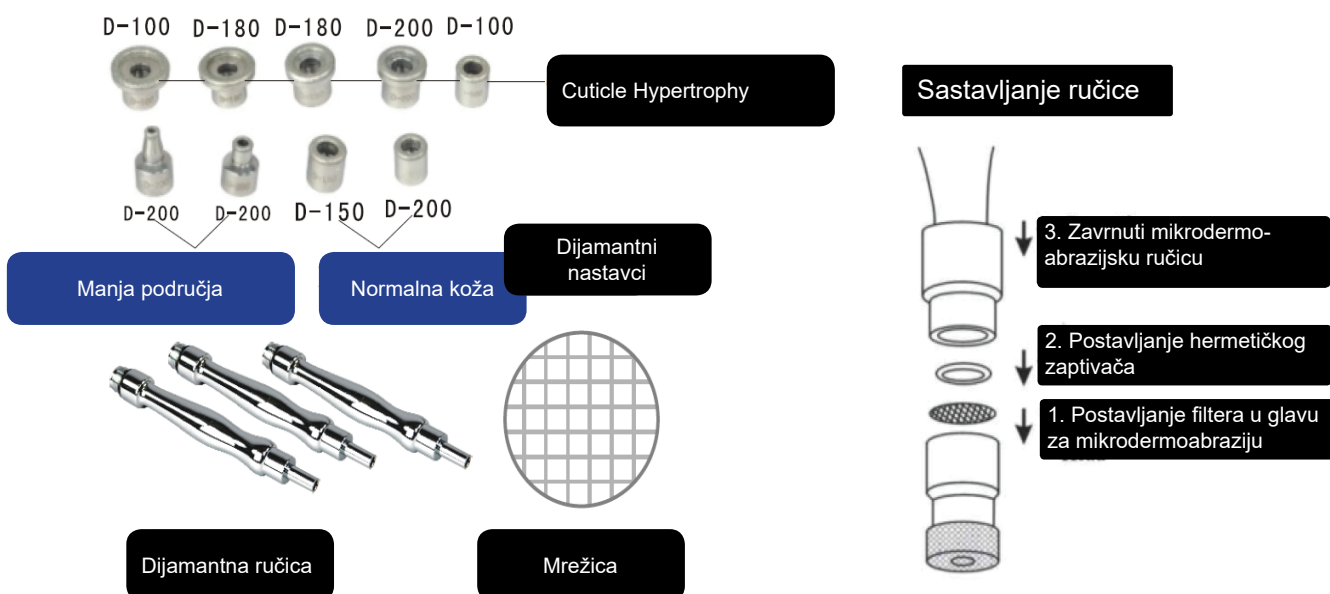

Upute za sastavljanje


- Dijamantska mikrodermoabrazija - sastavljanje

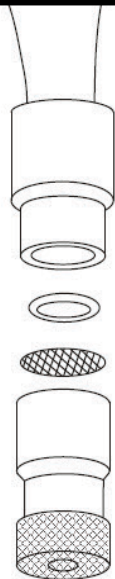


3. Rotirajuća dijamantna ručica

2. Stavljanje dihtung prstena

1. Stavljanje filter mrežice u dijamantni vrh

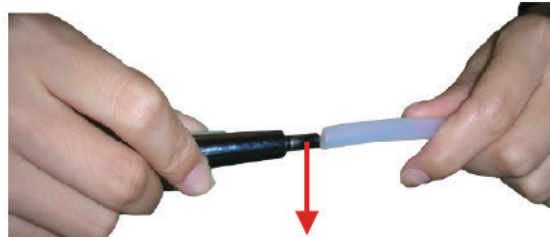

Spojiti cijev s dijamantnom ručicom

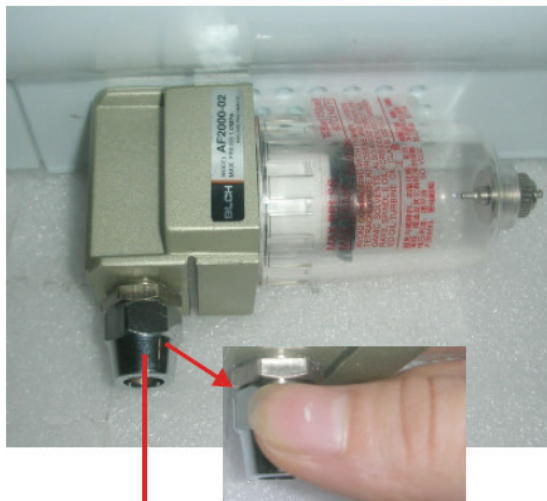

Odvrtnuti ga



Spojiti vijak i cijev



Spojiti cijev s glavnim okvirom



Zavrnuti vijak

Dijamantna mikrodermoabrazija - funkcije - upute

Princip mikrodermoabrazije

Mikrodermoabrazija je osvježavajući tehnika za kožu koja pomaže oporavku kože lica od izloženosti suncu i smanjuje učinke starenja.

Uređaj se koristi za blago prskanje zrakom, zajedno s dijamantnim vrhovima, preko lica, miješajući nježnu abraziju s usisavanjem te na taj način uklanjajući, vanjske, mrtve stanice kože.

Kao i kod drugih kožnih tehnike pomlađivanje, potrebno je više od jednog tretmana kako bi se smanjile ili uklonile sitne bore i neželjene pigmentacije.

Funkcije dijamantne mikrodermoabrazije

Mikrodermoabrazija je učinkovit u smanjenju bora, “svračijih nogu“, pjega i ožiljaka od akni. Stimulira proizvodnju stanica kože i kolagena. Ovo je dokazano vrlo popularan neoperacijski kozmetički postupak.

Kada se koristi redovito, ovaj sustav funkcionira izvrsno na svim tipovima kože i može se koristiti na licu, vratu ili cijelom tijelu za mladenački, ispolirani izgled. Rezultati tretmana su vidljivi odmah.

Nakon tretmana, trebali biste koristiti kist s vodom za čišćenje dijamantnih glava, te ih potom staviti u otopinu od 75% alkohol na 15 minuta, a zatim ih izvaditi, obrisati i osušiti. Prije sljedećeg korištenja stavite ih u sterilizator.

Prednosti

1. Fleksibilna ručica koja se prilagođava bilo kojem aparatu za mikrodermoabraziju neovisno o brendu. Jednostavna je za postavljanje i upotrebu.

2. Ima različite dijamantne nastavke sa preciznim kristalima koji se koriste za različite dijelove tijela, čak i za dio oko očiju. Možete podešavati nastavke, brzinu usisavanja i okretanja kako biste imali kontrolu mikrodermoabrazije s obzirom na dio kože koju tretirate.

- Za mikrodermoabraziju cijelog tijela.
- Za dio kože oko očiju koristite ovaj nastavak, posebno za tretiranje bora, mitesera i bijelih točkica.
- Za ožiljke, bore, oštećenu kožu.

3. Postojanost: Dijamantna površina omogućuje jako dug vijek trajanja

4. Sigurnost: Ukoliko eliminiramo aluminijsku prašinu sa kože, ne postoji nikakva opasnost pri upotrebi. Kozmetičar i pacijent ne moraju udisati aluminijsku prašinu te soba za tretiranje pacijenata mora biti čista. Ovaj tretman je idealan s obzirom da ne postoje nikakve smetnje da se nakon tretmana obavljaju svakodnevne obveze.

5. Rezultat nakon tretmana: Kada se skinu mrtve stanice kože, koža ostaje čista i ravna te se time povećava i dejstvo proizvoda za njegu kože.

6. Aparat se koristi za tretiranje:

1. Akni
2. Pigmentacije
3. Ožiljaka
4. Strija

Procedura

1. Parenje
2. Tretman mikrodermoabrazije
3. Čišćenje lica kremom
4. Maska lica za izbjeljivanje i hidrataciju
5. Esencija

Mjere opreza kod tretmana

1. Kozmetika koja se koristi s aparatom treba biti sigurnog sastava.
2. Nemojte koristiti kozmetičke preparate s alkoholom, kiselinama i lužinama.
3. Ako je potrebno koristite hidratizacijska sredstva i kolagen za zaštitu kože.
4. Nakon tretmana, molimo Vas da koristite kremu za zaštitu od sunca.
5. Korisno je ako koristite esencijalni gel s anti-iritacijskim i antiupalnim svojstvima.

Napomene

1. Ovo je profesionalni instrument i mogu ga koristiti samo kozmetičari i liječnici.
2. Ljudi s kožnim problemima ne mogu ga koristiti.
3. Ljudi s kapilarnim ekspanzijama ne mogu ga koristiti.
4. Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnosti ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu dobili dopuštenje od odgovorne osobe.
5. Držati van dohvata djece.

Koraci za rukovanje u procesu mikrodermoabrazije

1. Spojiti uređaj na napajanje.
2. Pritisnuti Power dugme za uključivanje uređaja.
3. Odabrati odgovarajući nastavak i mrežicu.

Napomena:

A. Ako osjetite da je snaga usisa premala potrebno je ponovno zamijeniti filter tijekom rukovanja. Broj različitih filtera ovisi o debljini kože, različitim dijelovima i veličinama kože koja se tretira.

B. Provjerite da su filteri na pravom mjestu.

C. Mikrodermoabrazijski nastavci su različitih veličina. Pravilo je da se prvo bira nastavak za grublju obradu pa onda onaj za finiju.

4. Prilagođavanje usisa - što je tanja koža to treba koristiti manji intenzitet usisa.
5. Postaviti vrijeme rada na 15 minuta.
6. Intenzitet usisa provjeriti na ruci ili dlanu prije upotrebe. Ne zadržavati dijamantni nastavak duže od 15 sekundi na jednom mjestu jer može doći do oštećenja kože.
7. Nakon tretmana, trebali biste koristiti kist s vodom za čišćenje dijamantnih glava, te ih potom staviti u otopinu od 75% alkohol na 15 minuta, a zatim ih izvaditi, obrisati i osušiti. Prije sljedećeg korištenja stavite ih u sterilizator.

Procedura

1. Parenje
2. Tretman mikrodermoabrazije
3. Čišćenje lica kremom
4. Maska lica za izbjeljivanje i hidrataciju
5. Esencija

Mjere opreza kod tretmana

1. Kozmetika koja se koristi s aparatom treba biti sigurnog sastava.
2. Nemojte koristiti kozmetičke preparate s alkoholom, kiselinama i lužinama.
3. Ako je potrebno koristite hidratizacijska sredstva i kolagen za zaštitu kože.
4. Nakon tretmana, molimo Vas da koristite kremu za zaštitu od sunca.
5. Korisno je ako koristite esencijalni gel s anti-iritacijskim i antiupalnim svojstvima.

Napomene

1. Ovo je profesionalni instrument i mogu ga koristiti samo kozmetičari i liječnici.
2. Ljudi s kožnim problemima ne mogu ga koristiti.
3. Ljudi s kapilarnim ekspanzijama ne mogu ga koristiti.
4. Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnosti ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu dobili dopuštenje od odgovorne osobe.
5. Držati van dohvata djece.

Koraci za rukovanje u procesu mikrodermoabrazije

1. Spojiti uređaj na napajanje.
2. Pritisnuti Power dugme za uključivanje uređaja.
3. Odabrati odgovarajući nastavak i mrežicu.

Napomena:

A. Ako osjetite da je snaga usisa premala potrebno je ponovno zamijeniti filter tijekom rukovanja. Broj različitih filtera ovisi o debljini kože, različitim dijelovima i veličinama kože koja se tretira.

B. Provjerite da su filteri na pravom mjestu.

C. Mikrodermoabrazijski nastavci su različitih veličina. Pravilo je da se prvo bira nastavak za grublju obradu pa onda onaj za finiju.

4. Prilagođavanje usisa - što je tanja koža to treba koristiti manji intenzitet usisa.
5. Postaviti vrijeme rada na 15 minuta.
6. Intenzitet usisa provjeriti na ruci ili dlanu prije upotrebe. Ne zadržavati dijamantni nastavak duže od 15 sekundi na jednom mjestu jer može doći do oštećenja kože.
7. Nakon tretmana, trebali biste koristiti kist s vodom za čišćenje dijamantnih glava, te ih potom staviti u otopinu od 75% alkohol na 15 minuta, a zatim ih izvaditi, obrisati i osušiti. Prije sljedećeg korištenja stavite ih u sterilizator.

Tehničke karakteristike

Specification

Power Supply: AC110V ☐ 220V ☐ 230V ☐ 240V ☐

Frequency : 50-60HZ

Power : 80W

Dimensions:

Table Type: 55×38×20CM G.W.: 6.5 KG

Standing Type: 103×50×41CM G.W.: 25 KG

Packing list

Item Name	Unit	Qty	Remarks	
Main frame	Set	1		
Microdermabrasion accessories	Set	1		
Connection pipe of diomond handle	Pc	20		
Filter mesh	Pc	10		
Seal ring	Pc	1		
Fuse	Pc	2		
Power wire	Pc	1		
Instruction	Pc	1		

Važna upozorenja

1. Molimo ne rastavljati opremu ili pokušati učiniti neke druge operacije, koja nisu navedena u uputama. Sve popravake treba raditi samo ovlašteno osoblje.
2. Paziti da uređaj nije u blizini ili u dodiru s vodom.
3. U slučaju pod 2. isključite uređaj iz napajanja i obratite se ovlaštenoj osobi. Isto učinite i u slučaju :
 - a. Oprema je čudnog mirisa, dimi i ispušta čudne zvukove.
 - b. Kabel je oštećen.
 - c. Oprema je pala i razbila se.
4. Pazite da kabel nije na mjestu gdje se može oštetiti.
5. Nakon korištenja isključite kabel iz napajanja.
6. Pripaziti da oprema stoji na stabilnom i sigurnom mjestu kako ne bi došlo do bilo kakvih oštećenja.